



# Razek Pump Evolution - RPE - I - Modo de Utilização

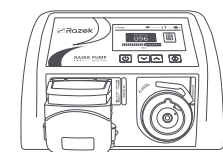


Razek Pump Evolution - RPE - I

1

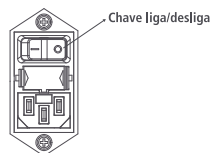


Posicionar a Razek Pump Evolution - RPE - I na mesma altura da cavidade a ser tratada. Em seguida, ligar o equipamento utilizando a chave liga/desliga localizada no painel traseiro.

2

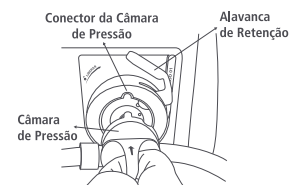


Levantar a alavanca de retenção, inserir a câmara de pressão no conector da câmara de pressão e depois abaixar a alavanca. Certificar-se da completa inserção.

3

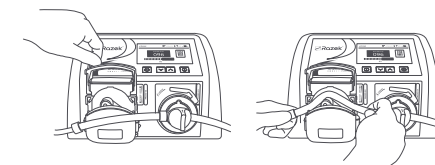

Abrir a tampa de bombeamento, em seguida, inserir o tubo de silicone do equipo no sistema de bombeamento.

4

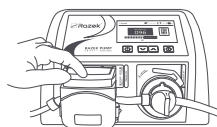

Fechar a tampa do sistema de bombeamento, finalizando a conexão do equipo.

5




Nunca permitir entrada de fluido no equipo antes da sua inserção na Razek Pump Evolution - RPE - I.

6




Pressionar todas as presilhas (clamps) do equipo para fechá-las.

7

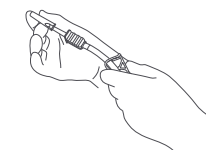


Retire as tampas dos conectores para o recipiente de fluido, de maneira a não o contaminar.

8

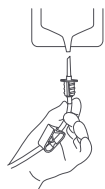


Inserir os conectores no recipiente de fluido. Abrir somente as presilhas do equipo que estão fora do campo cirúrgico.

9

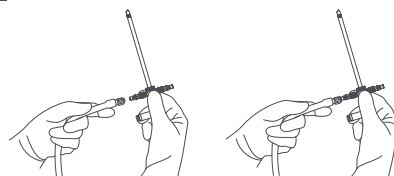


Retirar a tampa de proteção do conector luer lock do equipo e conectar no instrumental de acesso, em seguida, abrir a presilha.

10

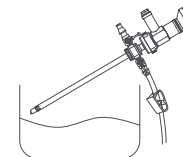

O instrumental de acesso acoplado ao endoscópio, deve estar dentro de uma cuba para evitar o vazamento de fluido. A torneira do instrumental conectada ao equipo deve estar aberta e outra fechada.

11

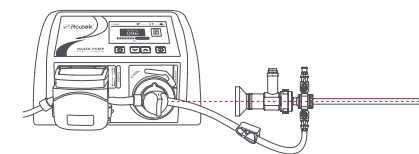

Garantir que o equipamento, instrumental de acesso e a cavidade a ser tratada estejam todos na mesma altura.

 Sempre leia o manual do usuário.


12



Deve ser realizado o reconhecimento sempre que houver troca do instrumental de acesso.



13



Na tela principal, pressione o botão  Iniciar/Parar para acessar a tela de Reconhecimento de Instrumental de acesso.

14



Pressione o botão  ou  para iniciar o reconhecimento do instrumental de acesso.

15



Aguardar até o final do reconhecimento, procurando movimentar o mínimo possível o instrumental de acesso.




16



A mensagem de reconhecimento de instrumental de acesso será emitida e a tela principal será novamente exibida.



17



Selecionar a pressão de trabalho desejada, utilizando as teclas  (diminuir pressão) e  (aumentar pressão) ou selecionando um preset .

18



Para iniciar a irrigação pressione o botão . Para interromper ou pausar a irrigação pressione a tecla .