



RAZEK FULL PRÓ - Guia de limpeza, esterilização e manutenção

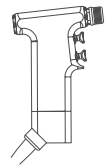


Razek Full Pró

1

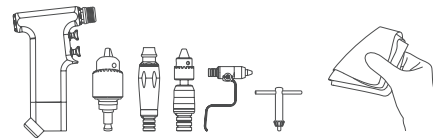


Realizar uma pré-limpeza das peças do Perfurador separadamente, após o término do procedimento cirúrgico. Utilizar um pano umedecido com solução de limpeza de instrumentais cirúrgicos a base de detergente enzimático.

2

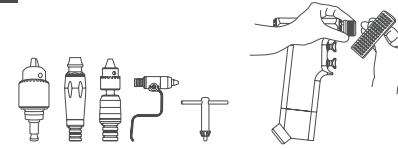


Recuar a luva do Perfurador e escovar toda superfície externa com uma escova de nylon macia, umedecida com a solução de limpeza mencionada anteriormente. Repetir o procedimento com Mandril, Reamer, Wire Pass e Chave para Mandril.

3

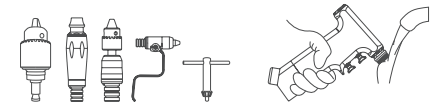

Enxaguar o Perfurador e seus acessórios em água corrente.
Não imergir o Perfurador.

4

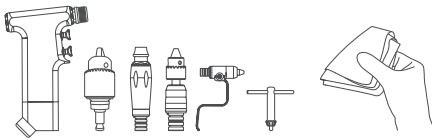

Retirar o excesso de água do Perfurador e seus acessórios com uma toalha de papel ou com uma pistola de ar.

5




Inserir o lubrificante ao redor da luva de recuo (óleo mineral de baixa viscosidade, por exemplo MaqSpray).

6




Não inserir o lubrificante no orifício de encaixe de Engate Power.

7

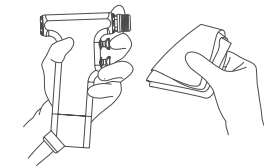

Montar o Razek Full Pro, deixar funcionar por 20 segundos e retirar o excesso do lubrificante com uma toalha de papel.

8

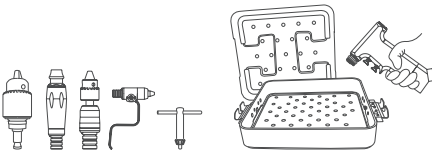

Colocar o Perfurador e seus acessórios dentro da caixa de instrumentos e enviar para esterilização. Certificar-se de que a caixa esteja limpa.

9



- Não utilizar agentes de limpeza à base de cloro corrosivo, tais como: lixívia, soda cáustica entre outros;
- Não use acetona;
- Não utilize agentes de limpeza contendo glutaraldeído.

10



O Cabo A/C e a Fonte de Alimentação **NÃO** podem ser esterilizados por nenhum método. Deve-se limpar toda a superfície com um pano umedecido em álcool 70%.

11

Poderá ser esterilizado em:
Autoclave:
Temperatura / Tempo: 135 °C por 15 minutos