

Cânula Descartável RZ



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE | EO

PRODUTO ESTÉRIL

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu “Instruções de Uso”.

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Venda através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A Cânula Descartável RZ é um dispositivo projetado para ser utilizado como guia de passagem da Ponteira Descartável RZ em procedimentos cirúrgicos de rizotomia.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

- Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)
- Classificação: Regra 6 – Classe II

ESPECIFICAÇÕES

- Esterilizado por: Óxido de Etileno
- Validade da esterilização: 2 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Observar todas as precauções importantes indicadas no Manual do Usuário da Ponteira Descartável RZ;



Antes de utilizar a Cânula Descartável RZ ler atentamente as instruções de uso;



Antes de iniciar qualquer procedimento certifique-se de que todos os materiais necessários encontram-se disponíveis e esterilizados;



Ao manipular o produto durante o procedimento, utilize sempre técnicas assépticas para evitar infecções;



Se a Cânula Descartável RZ apresentar qualquer dano não utilize;



NÃO REUTILIZE O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;



PROIBIDO REPROCESSAR;




Não utilizar o produto fora da validade.

CÂNULA DESCARTÁVEL RZ

A Cânula Descartável RZ é composta por:

1. Obturador: utilizado para a inserção da cânula;
2. Cânula: a cânula é utilizada como guia de passagem e está disponível em 4 diferentes comprimentos (5 cm, 10 cm, 15 cm e 20 cm).

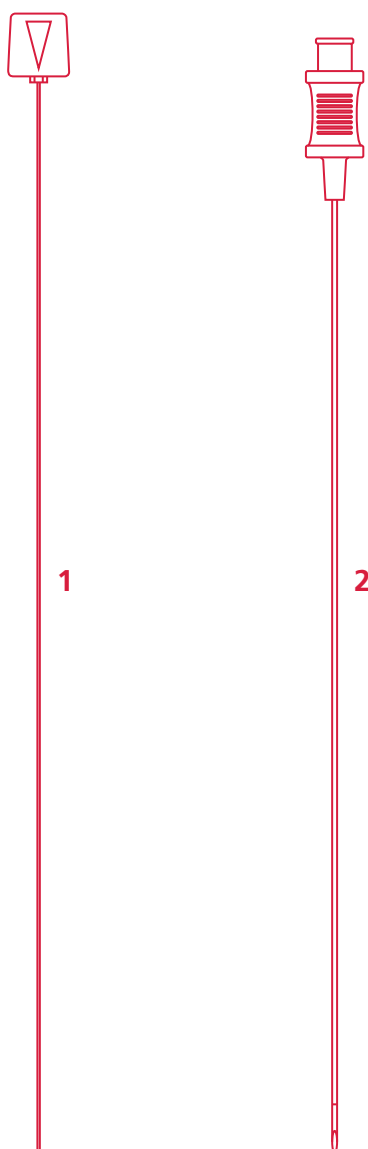

MODELOS DA FAMÍLIA DA CÂNULA DESCARTÁVEL RZ

▪ **Cânula Descartável RZ 5**

Este modelo apresenta cânula com 5 cm de comprimento.

▪ **Cânula Descartável RZ 10**

Este modelo apresenta cânula com 10 cm de comprimento.

▪ **Cânula Descartável RZ 15**

Este modelo apresenta cânula com 15 cm de comprimento.

▪ **Cânula Descartável RZ 20**

Este modelo apresenta cânula com 20 cm de comprimento.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com óxido de etileno. A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspeção a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

1. Preparar o paciente de acordo com técnicas para procedimentos com a Ponteira Descartável RZ;
2. Verifique se o obturador está conectado na cânula;
3. Insira a cânula com o obturador;
4. Retire o obturador da cânula;
5. Insira a Ponteira Descartável RZ;
6. Retire a cânula ao final do procedimento.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O produto segue em embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local. A Cânula Descartável RZ estando fora de uso deve ser protegida contra utilização inadvertida e não qualificada.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, dois anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação



Identifica o lote



Data de validade
do produto



Proibido reprocessar



Produto esterilizado
através de óxido de etileno



Fabricado por



Manter seco



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I
São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815

n.º ANVISA: 80356130153 - Nome Técnico: Cãnula

Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946



21-MAN-152R Rev.:01