

PB DiscSys

INDICAÇÕES

O PB DiscSys fornece um método para tratamento da descompressão intradiscal cervical, toráco-lombar e lombar, realizando coagulação, dissecação ou fulguração eletrocirúrgica, promovendo simultaneamente a irrigação contínua de fluidos através do Trocater. A irrigação é realizada por gravidade, porém, a vazão pode ser amplificada com o uso do exclusivo Intensificador de Fluxo, bem como controlada facilmente pelo cirurgião através do Clamp para interrupção do fluxo. Sua ponta ativa em material nobre e polida evita a aderência de tecido e proporciona a transferência de calor para longe da ponta, evitando o sobreaquecimento dos tecidos adjacentes. Tais características permitem a preservação das estruturas, evitando possíveis sangramentos e melhorando o pós-operatório.

Utiliza-se de apenas uma cânula através da pele, onde todo material é guiado por ela através de fluoroscopia. O método consiste em puncionar o disco herniado e promover a vaporização do material nuclear através de energia térmica gerada pelo sistema bipolar. A diminuição da pressão intra-discal alivia a pressão na periferia do disco e, conseqüentemente, a pressão sobre a raiz nervosa. A ponta ativa com movimento de pinçamento facilita a hemostasia, oferecendo segurança e precisão no ato cirúrgico. A irrigação contínua favorece um campo de visão limpo e resulta em pouco sangramento nas regiões altamente vascularizadas.



n.º ANVISA: 80356130199
Imagens meramente ilustrativas

MODELOS:

PB DISCSYS - C (881490200) - 300 mm

PB DISCSYS - L (881490100) - 450 mm



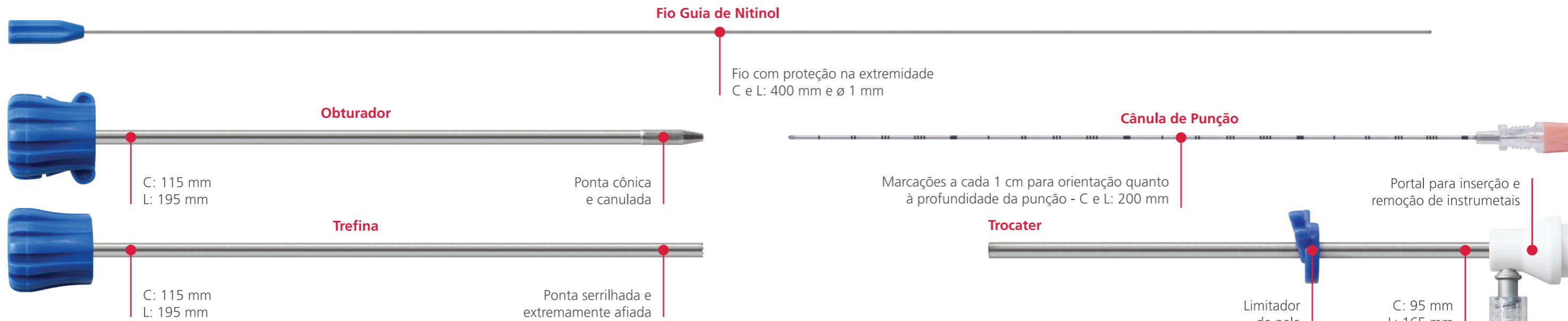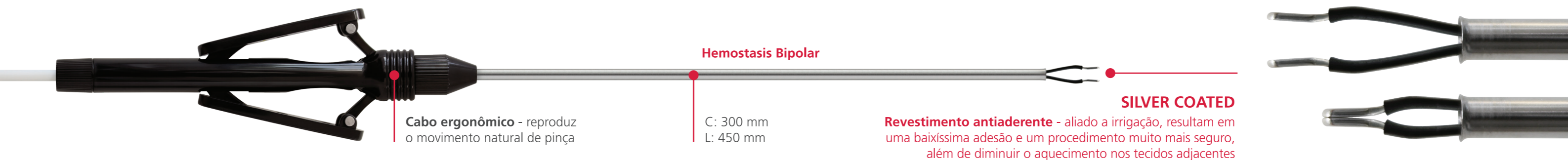

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

- Kit estéril e de uso único para o procedimento de acesso e descompressão intradiscal;
- Trocater com irrigação integrada e controlada pelo cirurgião, que possibilita a irrigação, a inserção e a remoção dos instrumentais;
- Disponível em 2 versões com comprimentos distintos, abrangendo diferentes regiões da coluna;
- Proporciona alta precisão no exercício de suas funções, minimizando as chances de danos aos tecidos locais;
- Permite vaporização e coagulação com eficácia e mínima perda de sangue;



- Pinça de hemostasia bipolar com ponta ativa que permite o pinçamento de tecidos e cabo ergonômico que reproduz o movimento natural de pinça pela mão do cirurgião.

ACESSÓRIO



Intensificador de Fluxo: O acessório deve ser utilizado no recipiente de fluido para intensificar o fluxo do fluido de irrigação. Acompanham 2 unidades por produto.





www.razek.com.br
+55 16 2107.2345