

Razek Pulse Pro

(Código: 750170000)



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE | EO

PRODUTO ESTÉRIL

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu "Instruções de Uso".

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Venda através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.


FINALIDADE

O Razek Pulse Pro é um equipamento utilizado em cirurgias ortopédicas e no tratamento de feridas. Em cirurgias ortopédicas o jato do Razek Pulse Pro penetra no osso removendo sangue e resíduos. No tratamento de feridas o Razek Pulse Pro facilita a remoção do tecido necrosado, bactérias e corpos estranhos da ferida.



O Razek Pulse Pro foi desenvolvido para ser utilizado por profissionais da área de saúde que estejam familiarizados com instrumentos cirúrgicos. O cirurgião é responsável pela aprendizagem das técnicas utilizadas neste sistema. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

RAZEK PULSE PRO

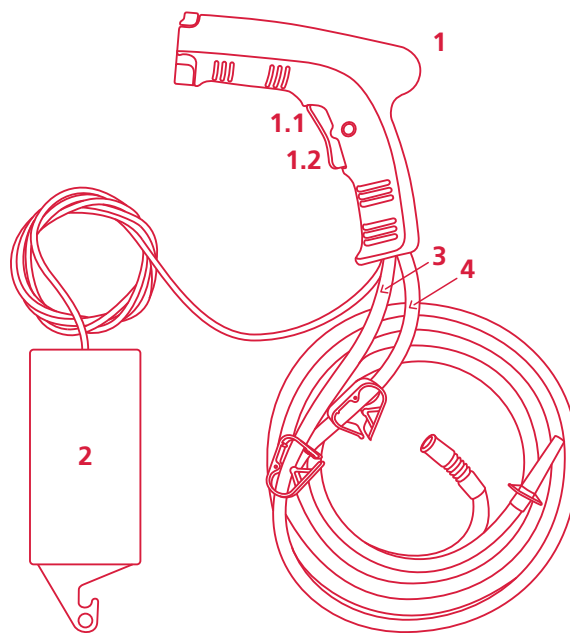


1. Peça de Mão do Razek Pulse Pro
 - 1.1. Gatilho superior: fluxo alta
 - 1.2. Gatilho inferior: fluxo baixa
2. Bateria do Razek Pulse Pro
3. Mangueira de Irrigação
4. Mangueira de Sucção

ACESSÓRIOS DO RAZEK PULSE PRO

▪ Cãnula Curta

Possui tubo injetor com 90 mm e protetor contra respingos.

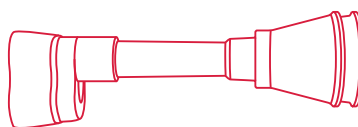

▪ Cãnula Longa

Possui tubo injetor com 200 mm.







O usuário deverá utilizar protetores de olhos quando estiver operando o equipamento, pois podem ocorrer respingos de fluidos e resíduos durante o uso.

INSTALAÇÃO DO RAZEK PULSE PRO

1. Pressione as presilhas da mangueira, conforme ilustrado a seguir, para fechá-las e impedir a passagem do fluido;

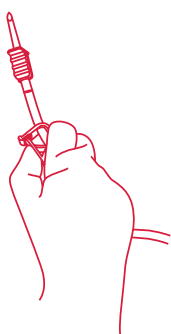


2. Retire os protetores de extremidade da conexão para o fluido;

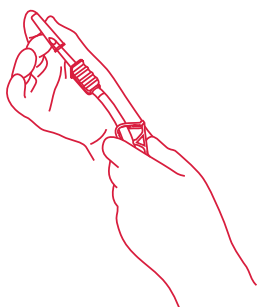


3. Insira os conectores para o fluido no recipiente de fluido;




4. Inserir o conector de sucção no equipamento de aspiração hospitalar padrão;

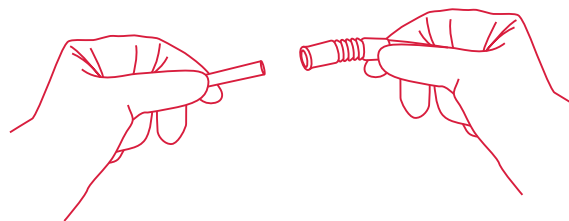

5. Insira a Cânula Curta ou Cânula Longa até o fundo da peça de mão;

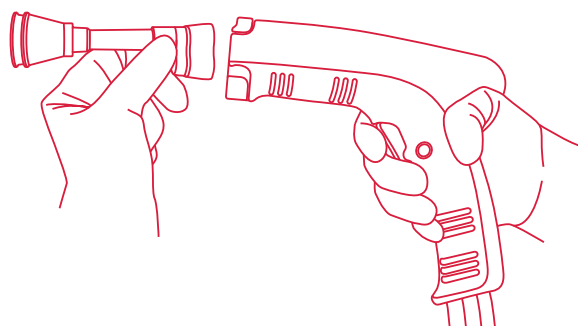


6. Pressione a trava da Peça de Mão para baixo, conforme ilustrado abaixo;

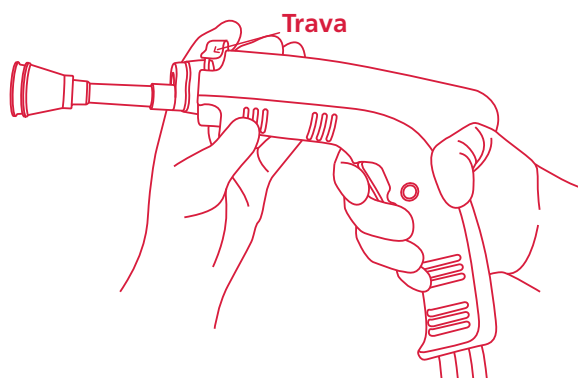

7. A Cânula Curta ou Cânula Longa está instalada. Para acionar o produto, deve-se retirar a proteção do gatilho e pressioná-lo.



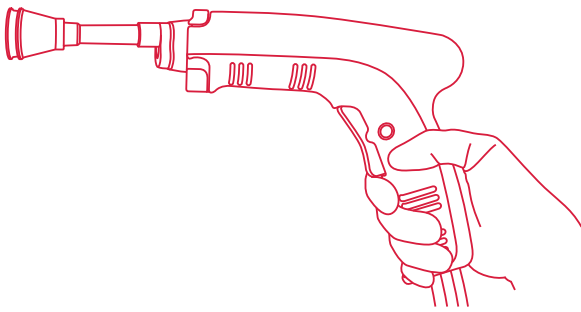

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

- Verificar se a embalagem está íntegra e sem sinais de violação;
- Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica;
- Verificar se o encaixe do conector para fluido e do recipiente estão seguros e não apresentam vazamentos;
- A escolha do fluido de irrigação é determinada pelo profissional com base no método a ser empregado.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS



Após o uso do Razek Pulse Pro, o mesmo deverá ser descartado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O Razek Pulse Pro deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O Razek Pulse Pro segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar em local fresco, seco e distante de poeira.

DESCARTE

O descarte do Razek Pulse Pro, após o uso, é de responsabilidade do usuário e deve atender a legislação local. O Razek Pulse Pro estando fora de uso deve ser protegido contra utilização inadvertida e não qualificada.

PRECAUÇÕES GENÉRICAS



NÃO REUTILIZE O RAZEK PULSE PRO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;

- Se o Razek Pulse Pro apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;
- Tenha à disposição, ao alcance imediato, um equipamento e acessórios de reserva, para que, em caso de falha, possa se terminar a operação;
- Não utilize qualquer componente que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irá danificar o motor do Razek Pulse Pro;
- O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do profissional;
- Não utilize o Razek Pulse Pro sem proteger os olhos;
- A substituição da Cânula deve ser realizada somente depois que o equipamento não estiver mais funcionando e nem superaquecido.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por óxido de etileno. A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

GARANTIA

O Razek Pulse Pro é um material de consumo, portanto o mesmo não possui garantia.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação



Identifica o lote



Data de validade do produto



Proibido reprocessar



Produto esterilizado através de óxido de etileno



Fabricado por



Manter seco



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I
São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815

n.º ANVISA: 80356139004 - Nome Técnico: Sistema de
Lavagem para Procedimentos Cirúrgicos

Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946



21-MAN-61R Rev.:01