



Arthrocut Razek

Manual do Usuário



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE | R

PRODUTO ESTÉRIL



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO DA FAMÍLIA ARTHROCUT RAZEK

A família Arthrocut Razek tem por finalidade fornecer ao cirurgião os instrumentos necessários para cortar tecidos em procedimentos cirurgicos artroscópicos.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por médicos, que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

ESPECIFICAÇÕES

- Esterilizado por: Raio Gama
- Validade da esterilização: 3 anos

CLASSIFICAÇÃO

- Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)
- Classificação: Regra 6 – Classe II

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Não utilizar o produto se a embalagem estiver violada;



O operador deverá manipular o Arthrocut Razek com cuidado, pois estes podem perfurar luvas cirúrgicas;



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado;




NÃO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;



Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado.

ARTHROCUT RAZEK

Os modelos do Arthrocut Razek é composto por:

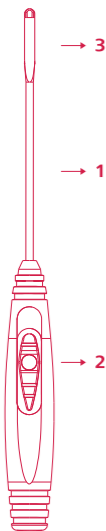

- 1 | Haste
- 2 | Botão de acionamento
- 3 | Ponta Cortante

MODELOS DA FAMÍLIA ARTHROCUT RAZEK

▪ Arthrocut Banana 110



▪ Arthrocut Banana 170



▪ Arthrocut Banana 220



▪ Arthrocut 2- Sided Point 110



▪ Arthrocut 2- Sided Point 170



▪ Arthrocut 2- Sided Point 220



▪ Arthrocut 2- Sided Round 110



- **Arthrocut 2- Sided Round 170**



- **Arthrocut 2- Sided Round 220**



- **Arthrocut Mini Meniscus 110**



- **Arthrocut Mini Meniscus 170**



- **Arthrocut Mini Meniscus 220**



- **Arthrocut Crescent 110**



- **Arthrocut Crescent 170**



- **Arthrocut Crescent 220**



- **Arthrocut Hook 110**



- **Arthrocut Hook 170**



- **Arthrocut Hook 220**



- **Arthrocut Retro 110**



▪ Arthrocut Retro 170



▪ Arthrocut Retro 220



▪ Arthrocut Rosette 110



▪ Arthrocut Rosette 170



▪ Arthrocut Rosette 220



ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspeccione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Os modelos da família Athrocut Razek devem ser selecionados e utilizados de acordo com a técnica cirúrgica adotada.

OBS: Durante os procedimentos cirúrgicos deve-se evitar esforços excessivos.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O Arthrocut Razek deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umida-

de, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após o término da vida útil do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o equipamento conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está associada a validade da esterilização, ou seja, três anos.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação.



Identifica o número de série.



Data de validade do produto.



Proibido reprocessar.



Produto esterilizado através de radiação.



Fabricado por.



Manter seco.



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior,

437 - Jardim São Paulo - São

Carlos/SP Brasil - CEP 13570-460

CNPJ 07.489.080/0001-30

Responsável Técnico: Renaldo

Massini Jr. - CREA SP 0601706815

Registro ANVISA: 80356130115

Nome Técnico:

Instrumentos Cirúrgicos

Assistência Técnica:

Razek Equipamentos Ltda

Fone: +55 16 2107 2345

Fax: +55 16 3374 5946

