

**Brocas
Diamantadas
HighCut**



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE R

PRODUTO ESTÉRIL

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek, em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu "Instruções de Uso".

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Vendas através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A família de Brocas Diamantadas HighCut tem por finalidade realizar acabamento, desbastes e raspagem óssea em procedimentos cirúrgicos.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)

Classificação: Regra 6 – Classe II

ESPECIFICAÇÕES

Esterilizado por: Raio Gama

Validade da esterilização: 3 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



A utilização de uma força excessiva no momento da inserção das Brocas Diamantadas HighCut poderá fazer com que a broca dobre ou quebre, causando lesões no operador;



Não utilize qualquer componente que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irá danificar as Brocas Diamantadas HighCut;



Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;



Nunca utilize um produto que apresente superaquecimento;



A substituição das brocas deve ser realizada somente depois que o equipamento não estiver mais funcionando e nem superaquecido;



O operador deverá manipular as Brocas Diamantadas HighCut com cuidado, pois estas podem perfurar luvas cirúrgicas. Todas as vezes que for necessário manipular as Brocas Diamantadas HighCut, use sua haste, que está fixada na peça de mão;



NÃO REUTILIZE O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;



PROIBIDO REPROCESSAR;



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado.

BROCAS DIAMANTADAS HIGHCUT

As Brocas Diamantadas HighCut são brocas para acabamento e polimento ósseo. A seguir estão indicados os tipos de encaixe. Deste modo, o usuário poderá facilmente identificar a broca necessária para cada peça de mão.

▪ Encaixe R



▪ Encaixe T



▪ Encaixe S



▪ Encaixe X



▪ Encaixe L



▪ Encaixe B



MODELOS

Os modelos da família das brocas serão diferenciados pelo comprimento, tipo de encaixe, e diâmetros. A seguir serão apresentados todos os modelos disponíveis.

▪ BHC



▪ **Comprimentos disponíveis:** 44,5 / 55 / 70 / 85* / 95 / 115 / 125 / 150 / 180 (mm)

▪ **Encaixes disponíveis:** R / T / S / X / L / B

▪ **Diâmetros disponíveis:** 0,6 / 0,7 / 0,8 / 1,0 / 1,4 / 1,5 / 1,8 / 2,0 / 2,3 / 2,5 / 2,7 / 3,0 / 3,1 / 3,5 / 4,0 / 4,5 / 5,0 / 5,5 / 6,0 (mm)

*Comprimento disponível apenas para os encaixes B

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Insira a broca seguindo as instruções fornecidas no Manual da peça de mão selecionada.

As técnicas de cirurgia variam de acordo com a escolha do método e do procedimento cirúrgico. Dessa forma, cabe ao cirurgião a escolha final do método e materiais a

serem empregados.



**CONSULTE O MANUAL DO USUÁRIO
DA PEÇA DE MÃO SELECIONADA.**

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS

Retire a broca da peça de mão.



Após o uso do produto, o mesmo deverá ser descartado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- O produto deve ser estocado em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação.



Identifica o lote.



Data de validade do produto.



Proibido reprocessar.



Produto esterilizado através de radiação.



Fabricado por.



Manter seco.

MODELOS

▪ BHC

Código	Modelo
979020010	BHC44,5R (0,6)
979020020	BHC44,5R (0,7)
979020030	BHC44,5R (0,8)
979020040	BHC44,5R (1,0)
979020050	BHC44,5R (1,4)
979020060	BHC44,5R (1,5)
979020070	BHC44,5R (1,8)
979020080	BHC44,5R (2,0)
979020090	BHC44,5R (2,3)
979020100	BHC44,5R (2,5)
979020110	BHC44,5R (2,7)
979020120	BHC44,5R (3,0)
979020130	BHC44,5R (3,1)
979020140	BHC44,5R (3,5)
979020150	BHC44,5R (4,0)
979020160	BHC44,5R (4,5)
979020170	BHC44,5R (5,0)
979020180	BHC44,5R (5,5)
979020190	BHC44,5R (6,0)
979020200	BHC55R (0,6)
979020210	BHC55R (0,7)
979020220	BHC55R (0,8)
979020230	BHC55R (1,0)
979020240	BHC55R (1,4)
979020250	BHC55R (1,5)
979020260	BHC55R (1,8)
979020270	BHC55R (2,0)
979020280	BHC55R (2,3)
979020290	BHC55R (2,5)
979020300	BHC55R (2,7)
979020310	BHC55R (3,0)
979020320	BHC55R (3,1)
979020330	BHC55R (3,5)
979020340	BHC55R (4,0)
979020350	BHC55R (4,5)
979020360	BHC55R (5,0)

979020370	BHC55R (5,5)
979020380	BHC55R (6,0)
979020390	BHC70R (0,6)
979020400	BHC70R (0,7)
979020410	BHC70R (0,8)
979020420	BHC70R (1,0)
979020430	BHC70R (1,4)
979020440	BHC70R (1,5)
979020450	BHC70R (1,8)
979020460	BHC70R (2,0)
979020470	BHC70R (2,3)
979020480	BHC70R (2,5)
979020490	BHC70R (2,7)
979020500	BHC70R (3,0)
979020510	BHC70R (3,1)
979020520	BHC70R (3,5)
979020530	BHC70R (4,0)
979020540	BHC70R (4,5)
979020550	BHC70R (5,0)
979020560	BHC70R (5,5)
979020570	BHC70R (6,0)
979020580	BHC95R (0,6)
979020590	BHC95R (0,7)
979020600	BHC95R (0,8)
979020610	BHC95R (1,0)
979020620	BHC95R (1,4)
979020630	BHC95R (1,5)
979020640	BHC95R (1,8)
979020650	BHC95R (2,0)
979020660	BHC95R (2,3)
979020670	BHC95R (2,5)
979020680	BHC95R (2,7)
979020690	BHC95R (3,0)
979020700	BHC95R (3,1)
979020710	BHC95R (3,5)
979020720	BHC95R (4,0)
979020730	BHC95R (4,5)

979020740	BHC95R (5,0)
979020750	BHC95R (5,5)
979020760	BHC95R (6,0)
979020770	BHC 115R (0,6)
979020780	BHC 115R (0,7)
979020790	BHC 115R (0,8)
979020800	BHC 115R (1,0)
979020810	BHC 115R (1,4)
979020820	BHC 115R (1,5)
979020830	BHC 115R (1,8)
979020840	BHC 115R (2,0)
979020850	BHC 115R (2,3)
979020860	BHC 115R (2,5)
979020870	BHC 115R (2,7)
979020880	BHC 115R (3,0)
979020890	BHC 115R (3,1)
979020900	BHC 115R (3,5)
979020910	BHC 115R (4,0)
979020920	BHC 115R (4,5)
979020930	BHC 115R (5,0)
979020940	BHC 115R (5,5)
979020950	BHC 115R (6,0)
979020960	BHC 125R (0,6)
979020970	BHC 125R (0,7)
979020980	BHC 125R (0,8)
979020990	BHC 125R (1,0)
979021000	BHC 125R (1,4)
979021010	BHC 125R (1,5)
979021020	BHC 125R (1,8)
979021030	BHC 125R (2,0)
979021040	BHC 125R (2,3)
979021050	BHC 125R (2,5)
979021060	BHC 125R (2,7)
979021070	BHC 125R (3,0)
979021080	BHC 125R (3,1)
979021090	BHC 125R (3,5)
979021100	BHC 125R (4,0)
979021110	BHC 125R (4,5)
979021120	BHC 125R (5,0)
979021130	BHC 125R (5,5)

979021140	BHC 125R (6,0)
979021150	BHC 150R (0,6)
979021160	BHC 150R (0,7)
979021170	BHC 150R (0,8)
979021180	BHC 150R (1,0)
979021190	BHC 150R (1,4)
979021200	BHC 150R (1,5)
979021210	BHC 150R (1,8)
979021220	BHC 150R (2,0)
979021230	BHC 150R (2,3)
979021240	BHC 150R (2,5)
979021250	BHC 150R (2,7)
979021260	BHC 150R (3,0)
979021270	BHC 150R (3,1)
979021280	BHC 150R (3,5)
979021290	BHC 150R (4,0)
979021300	BHC 150R (4,5)
979021310	BHC 150R (5,0)
979021320	BHC 150R (5,5)
979021330	BHC 150R (6,0)
979021340	BHC 180R (0,6)
979021350	BHC 180R (0,7)
979021360	BHC 180R (0,8)
979021370	BHC 180R (1,0)
979021380	BHC 180R (1,4)
979021390	BHC 180R (1,5)
979021400	BHC 180R (1,8)
979021410	BHC 180R (2,0)
979021420	BHC 180R (2,3)
979021430	BHC 180R (2,5)
979021440	BHC 180R (2,7)
979021450	BHC 180R (3,0)
979021460	BHC 180R (3,1)
979021470	BHC 180R (3,5)
979021480	BHC 180R (4,0)
979021490	BHC 180R (4,5)
979021500	BHC 180R (5,0)
979021510	BHC 180R (5,5)
979021520	BHC 180R (6,0)
979030010	BHC44,5T (0,6)

979030020	BHC44,5T (0,7)
979030030	BHC44,5T (0,8)
979030040	BHC44,5T (1,0)
979030050	BHC44,5T (1,4)
979030060	BHC44,5T (1,5)
979030070	BHC44,5T (1,8)
979030080	BHC44,5T (2,0)
979030090	BHC44,5T (2,3)
979030100	BHC44,5T (2,5)
979030110	BHC44,5T (2,7)
979030120	BHC44,5T (3,0)
979030130	BHC44,5T (3,1)
979030140	BHC44,5T (3,5)
979030150	BHC44,5T (4,0)
979030160	BHC44,5T (4,5)
979030170	BHC44,5T (5,0)
979030180	BHC44,5T (5,5)
979030190	BHC44,5T (6,0)
979030200	BHC55T (0,6)
979030210	BHC55T (0,7)
979030220	BHC55T (0,8)
979030230	BHC55T (1,0)
979030240	BHC55T (1,4)
979030250	BHC55T (1,5)
979030260	BHC55T (1,8)
979030270	BHC55T (2,0)
979030280	BHC55T (2,3)
979030290	BHC55T (2,5)
979030300	BHC55T (2,7)
979030310	BHC55T (3,0)
979030320	BHC55T (3,1)
979030330	BHC55T (3,5)
979030340	BHC55T (4,0)
979030350	BHC55T (4,5)
979030360	BHC55T (5,0)
979030370	BHC55T (5,5)
979030380	BHC55T (6,0)
979030390	BHC70T (0,6)
979030400	BHC70T (0,7)
979030410	BHC70T (0,8)

979030420	BHC70T (1,0)
979030430	BHC70T (1,4)
979030440	BHC70T (1,5)
979030450	BHC70T (1,8)
979030460	BHC70T (2,0)
979030470	BHC70T (2,3)
979030480	BHC70T (2,5)
979030490	BHC70T (2,7)
979030500	BHC70T (3,0)
979030510	BHC70T (3,1)
979030520	BHC70T (3,5)
979030530	BHC70T (4,0)
979030540	BHC70T (4,5)
979030550	BHC70T (5,0)
979030560	BHC70T (5,5)
979030570	BHC70T (6,0)
979030580	BHC95T (0,6)
979030590	BHC95T (0,7)
979030600	BHC95T (0,8)
979030610	BHC95T (1,0)
979030620	BHC95T (1,4)
979030630	BHC95T (1,5)
979030640	BHC95T (1,8)
979030650	BHC95T (2,0)
979030660	BHC95T (2,3)
979030670	BHC95T (2,5)
979030680	BHC95T (2,7)
979030690	BHC95T (3,0)
979030700	BHC95T (3,1)
979030710	BHC95T (3,5)
979030720	BHC95T (4,0)
979030730	BHC95T (4,5)
979030740	BHC95T (5,0)
979030750	BHC95T (5,5)
979030760	BHC95T (6,0)
979030770	BHC115T (0,6)
979030780	BHC115T (0,7)
979030790	BHC115T (0,8)
979030800	BHC115T (1,0)
979030810	BHC115T (1,4)

979030820	BHC 115T (1,5)
979030830	BHC 115T (1,8)
979030840	BHC 115T (2,0)
979030850	BHC 115T (2,3)
979030860	BHC 115T (2,5)
979030870	BHC 115T (2,7)
979030880	BHC 115T (3,0)
979030890	BHC 115T (3,1)
979030900	BHC 115T (3,5)
979030910	BHC 115T (4,0)
979030920	BHC 115T (4,5)
979030930	BHC 115T (5,0)
979030940	BHC 115T (5,5)
979030950	BHC 115T (6,0)
979030960	BHC 125T (0,6)
979030970	BHC 125T (0,7)
979030980	BHC 125T (0,8)
979030990	BHC 125T (1,0)
979031000	BHC 125T (1,4)
979031010	BHC 125T (1,5)
979031020	BHC 125T (1,8)
979031030	BHC 125T (2,0)
979031040	BHC 125T (2,3)
979031050	BHC 125T (2,5)
979031060	BHC 125T (2,7)
979031070	BHC 125T (3,0)
979031080	BHC 125T (3,1)
979031090	BHC 125T (3,5)
979031100	BHC 125T (4,0)
979031110	BHC 125T (4,5)
979031120	BHC 125T (5,0)
979031130	BHC 125T (5,5)
979031140	BHC 125T (6,0)
979031150	BHC 150T (0,6)
979031160	BHC 150T (0,7)
979031170	BHC 150T (0,8)
979031180	BHC 150T (1,0)
979031190	BHC 150T (1,4)
979031200	BHC 150T (1,5)
979031210	BHC 150T (1,8)

979031220	BHC 150T (2,0)
979031230	BHC 150T (2,3)
979031240	BHC 150T (2,5)
979031250	BHC 150T (2,7)
979031260	BHC 150T (3,0)
979031270	BHC 150T (3,1)
979031280	BHC 150T (3,5)
979031290	BHC 150T (4,0)
979031300	BHC 150T (4,5)
979031310	BHC 150T (5,0)
979031320	BHC 150T (5,5)
979031330	BHC 150T (6,0)
979031340	BHC 180T (0,6)
979031350	BHC 180T (0,7)
979031360	BHC 180T (0,8)
979031370	BHC 180T (1,0)
979031380	BHC 180T (1,4)
979031390	BHC 180T (1,5)
979031400	BHC 180T (1,8)
979031410	BHC 180T (2,0)
979031420	BHC 180T (2,3)
979031430	BHC 180T (2,5)
979031440	BHC 180T (2,7)
979031450	BHC 180T (3,0)
979031460	BHC 180T (3,1)
979031470	BHC 180T (3,5)
979031480	BHC 180T (4,0)
979031490	BHC 180T (4,5)
979031500	BHC 180T (5,0)
979031510	BHC 180T (5,5)
979031520	BHC 180T (6,0)
979040010	BHC44,5S (0,6)
979040020	BHC44,5S (0,7)
979040030	BHC44,5S (0,8)
979040040	BHC44,5S (1,0)
979040050	BHC44,5S (1,4)
979040060	BHC44,5S (1,5)
979040070	BHC44,5S (1,8)
979040080	BHC44,5S (2,0)
979040090	BHC44,5S (2,3)

979040100	BHC44,5S (2,5)
979040110	BHC44,5S (2,7)
979040120	BHC44,5S (3,0)
979040130	BHC44,5S (3,1)
979040140	BHC44,5S (3,5)
979040150	BHC44,5S (4,0)
979040160	BHC44,5S (4,5)
979040170	BHC44,5S (5,0)
979040180	BHC44,5S (5,5)
979040190	BHC44,5S (6,0)
979040200	BHC55S (0,6)
979040210	BHC55S (0,7)
979040220	BHC55S (0,8)
979040230	BHC55S (1,0)
979040240	BHC55S (1,4)
979040250	BHC55S (1,5)
979040260	BHC55S (1,8)
979040270	BHC55S (2,0)
979040280	BHC55S (2,3)
979040290	BHC55S (2,5)
979040300	BHC55S (2,7)
979040310	BHC55S (3,0)
979040320	BHC55S (3,1)
979040330	BHC55S (3,5)
979040340	BHC55S (4,0)
979040350	BHC55S (4,5)
979040360	BHC55S (5,0)
979040370	BHC55S (5,5)
979040380	BHC55S (6,0)
979040390	BHC70S (0,6)
979040400	BHC70S (0,7)
979040410	BHC70S (0,8)
979040420	BHC70S (1,0)
979040430	BHC70S (1,4)
979040440	BHC70S (1,5)
979040450	BHC70S (1,8)
979040460	BHC70S (2,0)
979040470	BHC70S (2,3)
979040480	BHC70S (2,5)
979040490	BHC70S (2,7)

979040500	BHC70S (3,0)
979040510	BHC70S (3,1)
979040520	BHC70S (3,5)
979040530	BHC70S (4,0)
979040540	BHC70S (4,5)
979040550	BHC70S (5,0)
979040560	BHC70S (5,5)
979040570	BHC70S (6,0)
979040580	BHC95S (0,6)
979040590	BHC95S (0,7)
979040600	BHC95S (0,8)
979040610	BHC95S (1,0)
979040620	BHC95S (1,4)
979040630	BHC95S (1,5)
979040640	BHC95S (1,8)
979040650	BHC95S (2,0)
979040660	BHC95S (2,3)
979040670	BHC95S (2,5)
979040680	BHC95S (2,7)
979040690	BHC95S (3,0)
979040700	BHC95S (3,1)
979040710	BHC95S (3,5)
979040720	BHC95S (4,0)
979040730	BHC95S (4,5)
979040740	BHC95S (5,0)
979040750	BHC95S (5,5)
979040760	BHC95S (6,0)
979040770	BHC115S (0,6)
979040780	BHC115S (0,7)
979040790	BHC115S (0,8)
979040800	BHC115S (1,0)
979040810	BHC115S (1,4)
979040820	BHC115S (1,5)
979040830	BHC115S (1,8)
979040840	BHC115S (2,0)
979040850	BHC115S (2,3)
979040860	BHC115S (2,5)
979040870	BHC115S (2,7)
979040880	BHC115S (3,0)
979040890	BHC115S (3,1)

979040900	BHC 115S (3,5)
979040910	BHC 115S (4,0)
979040920	BHC 115S (4,5)
979040930	BHC 115S (5,0)
979040940	BHC 115S (5,5)
979040950	BHC 115S (6,0)
979040960	BHC 125S (0,6)
979040970	BHC 125S (0,7)
979040980	BHC 125S (0,8)
979040990	BHC 125S (1,0)
979041000	BHC 125S (1,4)
979041010	BHC 125S (1,5)
979041020	BHC 125S (1,8)
979041030	BHC 125S (2,0)
979041040	BHC 125S (2,3)
979041050	BHC 125S (2,5)
979041060	BHC 125S (2,7)
979041070	BHC 125S (3,0)
979041080	BHC 125S (3,1)
979041090	BHC 125S (3,5)
979041100	BHC 125S (4,0)
979041110	BHC 125S (4,5)
979041120	BHC 125S (5,0)
979041130	BHC 125S (5,5)
979041140	BHC 125S (6,0)
979041150	BHC 150S (0,6)
979041160	BHC 150S (0,7)
979041170	BHC 150S (0,8)
979041180	BHC 150S (1,0)
979041190	BHC 150S (1,4)
979041200	BHC 150S (1,5)
979041210	BHC 150S (1,8)
979041220	BHC 150S (2,0)
979041230	BHC 150S (2,3)
979041240	BHC 150S (2,5)
979041250	BHC 150S (2,7)
979041260	BHC 150S (3,0)
979041270	BHC 150S (3,1)
979041280	BHC 150S (3,5)
979041290	BHC 150S (4,0)

979041300	BHC 150S (4,5)
979041310	BHC 150S (5,0)
979041320	BHC 150S (5,5)
979041330	BHC 150S (6,0)
979041340	BHC 180S (0,6)
979041350	BHC 180S (0,7)
979041360	BHC 180S (0,8)
979041370	BHC 180S (1,0)
979041380	BHC 180S (1,4)
979041390	BHC 180S (1,5)
979041400	BHC 180S (1,8)
979041410	BHC 180S (2,0)
979041420	BHC 180S (2,3)
979041430	BHC 180S (2,5)
979041440	BHC 180S (2,7)
979041450	BHC 180S (3,0)
979041460	BHC 180S (3,1)
979041470	BHC 180S (3,5)
979041480	BHC 180S (4,0)
979041490	BHC 180S (4,5)
979041500	BHC 180S (5,0)
979041510	BHC 180S (5,5)
979041520	BHC 180S (6,0)
979050010	BHC44,5X (0,6)
979050020	BHC44,5X (0,7)
979050030	BHC44,5X (0,8)
979050040	BHC44,5X (1,0)
979050050	BHC44,5X (1,4)
979050060	BHC44,5X (1,5)
979050070	BHC44,5X (1,8)
979050080	BHC44,5X (2,0)
979050090	BHC44,5X (2,3)
979050100	BHC44,5X (2,5)
979050110	BHC44,5X (2,7)
979050120	BHC44,5X (3,0)
979050130	BHC44,5X (3,1)
979050140	BHC44,5X (3,5)
979050150	BHC44,5X (4,0)
979050160	BHC44,5X (4,5)
979050170	BHC44,5X (5,0)

979050180	BHC44,5X (5,5)
979050190	BHC44,5X (6,0)
979050200	BHC55X (0,6)
979050210	BHC55X (0,7)
979050220	BHC55X (0,8)
979050230	BHC55X (1,0)
979050240	BHC55X (1,4)
979050250	BHC55X (1,5)
979050260	BHC55X (1,8)
979050270	BHC55X (2,0)
979050280	BHC55X (2,3)
979050290	BHC55X (2,5)
979050300	BHC55X (2,7)
979050310	BHC55X (3,0)
979050320	BHC55X (3,1)
979050330	BHC55X (3,5)
979050340	BHC55X (4,0)
979050350	BHC55X (4,5)
979050360	BHC55X (5,0)
979050370	BHC55X (5,5)
979050380	BHC55X (6,0)
979050390	BHC70X (0,6)
979050400	BHC70X (0,7)
979050410	BHC70X (0,8)
979050420	BHC70X (1,0)
979050430	BHC70X (1,4)
979050440	BHC70X (1,5)
979050450	BHC70X (1,8)
979050460	BHC70X (2,0)
979050470	BHC70X (2,3)
979050480	BHC70X (2,5)
979050490	BHC70X (2,7)
979050500	BHC70X (3,0)
979050510	BHC70X (3,1)
979050520	BHC70X (3,5)
979050530	BHC70X (4,0)
979050540	BHC70X (4,5)
979050550	BHC70X (5,0)
979050560	BHC70X (5,5)
979050570	BHC70X (6,0)

979050580	BHC95X (0,6)
979050590	BHC95X (0,7)
979050600	BHC95X (0,8)
979050610	BHC95X (1,0)
979050620	BHC95X (1,4)
979050630	BHC95X (1,5)
979050640	BHC95X (1,8)
979050650	BHC95X (2,0)
979050660	BHC95X (2,3)
979050670	BHC95X (2,5)
979050680	BHC95X (2,7)
979050690	BHC95X (3,0)
979050700	BHC95X (3,1)
979050710	BHC95X (3,5)
979050720	BHC95X (4,0)
979050730	BHC95X (4,5)
979050740	BHC95X (5,0)
979050750	BHC95X (5,5)
979050760	BHC95X (6,0)
979050770	BHC115X (0,6)
979050780	BHC115X (0,7)
979050790	BHC115X (0,8)
979050800	BHC115X (1,0)
979050810	BHC115X (1,4)
979050820	BHC115X (1,5)
979050830	BHC115X (1,8)
979050840	BHC115X (2,0)
979050850	BHC115X (2,3)
979050860	BHC115X (2,5)
979050870	BHC115X (2,7)
979050880	BHC115X (3,0)
979050890	BHC115X (3,1)
979050900	BHC115X (3,5)
979050910	BHC115X (4,0)
979050920	BHC115X (4,5)
979050930	BHC115X (5,0)
979050940	BHC115X (5,5)
979050950	BHC115X (6,0)
979050960	BHC125X (0,6)
979050970	BHC125X (0,7)

979050980	BHC 125X (0,8)
979050990	BHC 125X (1,0)
979051000	BHC 125X (1,4)
979051010	BHC 125X (1,5)
979051020	BHC 125X (1,8)
979051030	BHC 125X (2,0)
979051040	BHC 125X (2,3)
979051050	BHC 125X (2,5)
979051060	BHC 125X (2,7)
979051070	BHC 125X (3,0)
979051080	BHC 125X (3,1)
979051090	BHC 125X (3,5)
979051100	BHC 125X (4,0)
979051110	BHC 125X (4,5)
979051120	BHC 125X (5,0)
979051130	BHC 125X (5,5)
979051140	BHC 125X (6,0)
979051150	BHC 150X (0,6)
979051160	BHC 150X (0,7)
979051170	BHC 150X (0,8)
979051180	BHC 150X (1,0)
979051190	BHC 150X (1,4)
979051200	BHC 150X (1,5)
979051210	BHC 150X (1,8)
979051220	BHC 150X (2,0)
979051230	BHC 150X (2,3)
979051240	BHC 150X (2,5)
979051250	BHC 150X (2,7)
979051260	BHC 150X (3,0)
979051270	BHC 150X (3,1)
979051280	BHC 150X (3,5)
979051290	BHC 150X (4,0)
979051300	BHC 150X (4,5)
979051310	BHC 150X (5,0)
979051320	BHC 150X (5,5)
979051330	BHC 150X (6,0)
979051340	BHC 180X (0,6)
979051350	BHC 180X (0,7)
979051360	BHC 180X (0,8)
979051370	BHC 180X (1,0)

979051380	BHC 180X (1,4)
979051390	BHC 180X (1,5)
979051400	BHC 180X (1,8)
979051410	BHC 180X (2,0)
979051420	BHC 180X (2,3)
979051430	BHC 180X (2,5)
979051440	BHC 180X (2,7)
979051450	BHC 180X (3,0)
979051460	BHC 180X (3,1)
979051470	BHC 180X (3,5)
979051480	BHC 180X (4,0)
979051490	BHC 180X (4,5)
979051500	BHC 180X (5,0)
979051510	BHC 180X (5,5)
979051520	BHC 180X (6,0)
979060010	BHC44,5L (0,6)
979060020	BHC44,5L (0,7)
979060030	BHC44,5L (0,8)
979060040	BHC44,5L (1,0)
979060050	BHC44,5L (1,4)
979060060	BHC44,5L (1,5)
979060070	BHC44,5L (1,8)
979060080	BHC44,5L (2,0)
979060090	BHC44,5L (2,3)
979060100	BHC44,5L (2,5)
979060110	BHC44,5L (2,7)
979060120	BHC44,5L (3,0)
979060130	BHC44,5L (3,1)
979060140	BHC44,5L (3,5)
979060150	BHC44,5L (4,0)
979060160	BHC44,5L (4,5)
979060170	BHC44,5L (5,0)
979060180	BHC44,5L (5,5)
979060190	BHC44,5L (6,0)
979060200	BHC55L (0,6)
979060210	BHC55L (0,7)
979060220	BHC55L (0,8)
979060230	BHC55L (1,0)
979060240	BHC55L (1,4)
979060250	BHC55L (1,5)

979060260	BHC55L (1,8)
979060270	BHC55L (2,0)
979060280	BHC55L (2,3)
979060290	BHC55L (2,5)
979060300	BHC55L (2,7)
979060310	BHC55L (3,0)
979060320	BHC55L (3,1)
979060330	BHC55L (3,5)
979060340	BHC55L (4,0)
979060350	BHC55L (4,5)
979060360	BHC55L (5,0)
979060370	BHC55L (5,5)
979060380	BHC55L (6,0)
979060390	BHC70L (0,6)
979060400	BHC70L (0,7)
979060410	BHC70L (0,8)
979060420	BHC70L (1,0)
979060430	BHC70L (1,4)
979060440	BHC70L (1,5)
979060450	BHC70L (1,8)
979060460	BHC70L (2,0)
979060470	BHC70L (2,3)
979060480	BHC70L (2,5)
979060490	BHC70L (2,7)
979060500	BHC70L (3,0)
979060510	BHC70L (3,1)
979060520	BHC70L (3,5)
979060530	BHC70L (4,0)
979060540	BHC70L (4,5)
979060550	BHC70L (5,0)
979060560	BHC70L (5,5)
979060570	BHC70L (6,0)
979060580	BHC95L (0,6)
979060590	BHC95L (0,7)
979060600	BHC95L (0,8)
979060610	BHC95L (1,0)
979060620	BHC95L (1,4)
979060630	BHC95L (1,5)
979060640	BHC95L (1,8)
979060650	BHC95L (2,0)

979060660	BHC95L (2,3)
979060670	BHC95L (2,5)
979060680	BHC95L (2,7)
979060690	BHC95L (3,0)
979060700	BHC95L (3,1)
979060710	BHC95L (3,5)
979060720	BHC95L (4,0)
979060730	BHC95L (4,5)
979060740	BHC95L (5,0)
979060750	BHC95L (5,5)
979060760	BHC95L (6,0)
979060770	BHC115L (0,6)
979060780	BHC115L (0,7)
979060790	BHC115L (0,8)
979060800	BHC115L (1,0)
979060810	BHC115L (1,4)
979060820	BHC115L (1,5)
979060830	BHC115L (1,8)
979060840	BHC115L (2,0)
979060850	BHC115L (2,3)
979060860	BHC115L (2,5)
979060870	BHC115L (2,7)
979060880	BHC115L (3,0)
979060890	BHC115L (3,1)
979060900	BHC115L (3,5)
979060910	BHC115L (4,0)
979060920	BHC115L (4,5)
979060930	BHC115L (5,0)
979060940	BHC115L (5,5)
979060950	BHC115L (6,0)
979060960	BHC125L (0,6)
979060970	BHC125L (0,7)
979060980	BHC125L (0,8)
979060990	BHC125L (1,0)
979061000	BHC125L (1,4)
979061010	BHC125L (1,5)
979061020	BHC125L (1,8)
979061030	BHC125L (2,0)
979061040	BHC125L (2,3)
979061050	BHC125L (2,5)

979061060	BHC 125L (2,7)
979061070	BHC 125L (3,0)
979061080	BHC 125L (3,1)
979061090	BHC 125L (3,5)
979061100	BHC 125L (4,0)
979061110	BHC 125L (4,5)
979061120	BHC 125L (5,0)
979061130	BHC 125L (5,5)
979061140	BHC 125L (6,0)
979061150	BHC 150L (0,6)
979061160	BHC 150L (0,7)
979061170	BHC 150L (0,8)
979061180	BHC 150L (1,0)
979061190	BHC 150L (1,4)
979061200	BHC 150L (1,5)
979061210	BHC 150L (1,8)
979061220	BHC 150L (2,0)
979061230	BHC 150L (2,3)
979061240	BHC 150L (2,5)
979061250	BHC 150L (2,7)
979061260	BHC 150L (3,0)
979061270	BHC 150L (3,1)
979061280	BHC 150L (3,5)
979061290	BHC 150L (4,0)
979061300	BHC 150L (4,5)
979061310	BHC 150L (5,0)
979061320	BHC 150L (5,5)
979061330	BHC 150L (6,0)
979061340	BHC 180L (0,6)
979061350	BHC 180L (0,7)
979061360	BHC 180L (0,8)
979061370	BHC 180L (1,0)
979061380	BHC 180L (1,4)
979061390	BHC 180L (1,5)
979061400	BHC 180L (1,8)
979061410	BHC 180L (2,0)
979061420	BHC 180L (2,3)
979061430	BHC 180L (2,5)
979061440	BHC 180L (2,7)
979061450	BHC 180L (3,0)

979061460	BHC 180L (3,1)
979061470	BHC 180L (3,5)
979061480	BHC 180L (4,0)
979061490	BHC 180L (4,5)
979061500	BHC 180L (5,0)
979061510	BHC 180L (5,5)
979061520	BHC 180L (6,0)
979070010	BHC44,5B (0,6)
979070020	BHC44,5B (0,7)
979070030	BHC44,5B (0,8)
979070040	BHC44,5B (1,0)
979070050	BHC44,5B (1,4)
979070060	BHC44,5B (1,5)
979070070	BHC44,5B (1,8)
979070080	BHC44,5B (2,0)
979070090	BHC44,5B (2,3)
979070100	BHC44,5B (2,5)
979070110	BHC44,5B (2,7)
979070120	BHC44,5B (3,0)
979070130	BHC44,5B (3,1)
979070140	BHC44,5B (3,5)
979070150	BHC44,5B (4,0)
979070160	BHC44,5B (4,5)
979070170	BHC44,5B (5,0)
979070180	BHC44,5B (5,5)
979070190	BHC44,5B (6,0)
979070200	BHC55B (0,6)
979070210	BHC55B (0,7)
979070220	BHC55B (0,8)
979070230	BHC55B (1,0)
979070240	BHC55B (1,4)
979070250	BHC55B (1,5)
979070260	BHC55B (1,8)
979070270	BHC55B (2,0)
979070280	BHC55B (2,3)
979070290	BHC55B (2,5)
979070300	BHC55B (2,7)
979070310	BHC55B (3,0)
979070320	BHC55B (3,1)
979070330	BHC55B (3,5)

979070340	BHC55B (4,0)
979070350	BHC55B (4,5)
979070360	BHC55B (5,0)
979070370	BHC55B (5,5)
979070380	BHC55B (6,0)
979070390	BHC70B (0,6)
979070400	BHC70B (0,7)
979070410	BHC70B (0,8)
979070420	BHC70B (1,0)
979070430	BHC70B (1,4)
979070440	BHC70B (1,5)
979070450	BHC70B (1,8)
979070460	BHC70B (2,0)
979070470	BHC70B (2,3)
979070480	BHC70B (2,5)
979070490	BHC70B (2,7)
979070500	BHC70B (3,0)
979070510	BHC70B (3,1)
979070520	BHC70B (3,5)
979070530	BHC70B (4,0)
979070540	BHC70B (4,5)
979070550	BHC70B (5,0)
979070560	BHC70B (5,5)
979070570	BHC70B (6,0)
979070580	BHC85B (0,6)
979070590	BHC85B (0,7)
979070600	BHC85B (0,8)
979070610	BHC85B (1,0)
979070620	BHC85B (1,4)
979070630	BHC85B (1,5)
979070640	BHC85B (1,8)
979070650	BHC85B (2,0)
979070660	BHC85B (2,3)
979070670	BHC85B (2,5)
979070680	BHC85B (2,7)
979070690	BHC85B (3,0)
979070700	BHC85B (3,1)
979070710	BHC85B (3,5)
979070720	BHC85B (4,0)
979070730	BHC85B (4,5)

979070740	BHC85B (5,0)
979070750	BHC85B (5,5)
979070760	BHC85B (6,0)
979070770	BHC95B (0,6)
979070780	BHC95B (0,7)
979070790	BHC95B (0,8)
979070800	BHC95B (1,0)
979070810	BHC95B (1,4)
979070820	BHC95B (1,5)
979070830	BHC95B (1,8)
979070840	BHC95B (2,0)
979070850	BHC95B (2,3)
979070860	BHC95B (2,5)
979070870	BHC95B (2,7)
979070880	BHC95B (3,0)
979070890	BHC95B (3,1)
979070900	BHC95B (3,5)
979070910	BHC95B (4,0)
979070920	BHC95B (4,5)
979070930	BHC95B (5,0)
979070940	BHC95B (5,5)
979070950	BHC95B (6,0)
979070960	BHC115B (0,6)
979070970	BHC115B (0,7)
979070980	BHC115B (0,8)
979070990	BHC115B (1,0)
979071000	BHC115B (1,4)
979071010	BHC115B (1,5)
979071020	BHC115B (1,8)
979071030	BHC115B (2,0)
979071040	BHC115B (2,3)
979071050	BHC115B (2,5)
979071060	BHC115B (2,7)
979071070	BHC115B (3,0)
979071080	BHC115B (3,1)
979071090	BHC115B (3,5)
979071100	BHC115B (4,0)
979071110	BHC115B (4,5)
979071120	BHC115B (5,0)
979071130	BHC115B (5,5)

979071140	BHC 115B (6,0)
979071150	BHC 125B (0,6)
979071160	BHC 125B (0,7)
979071170	BHC 125B (0,8)
979071180	BHC 125B(1,0)
979071190	BHC 125B (1,4)
979071200	BHC 125B (1,5)
979071210	BHC 125B (1,8)
979071220	BHC 125B (2,0)
979071230	BHC 125B (2,3)
979071240	BHC 125B (2,5)
979071250	BHC 125B (2,7)
979071260	BHC 125B (3,0)
979071270	BHC 125B (3,1)
979071280	BHC 125B (3,5)
979071290	BHC 125B (4,0)
979071300	BHC 125B (4,5)
979071310	BHC 125B (5,0)
979071320	BHC 125B (5,5)
979071330	BHC 125B (6,0)
979071340	BHC 150B (0,6)
979071350	BHC 150B (0,7)
979071360	BHC 150B (0,8)
979071370	BHC 150B(1,0)
979071380	BHC 150B (1,4)
979071390	BHC 150B (1,5)
979071400	BHC 150B (1,8)
979071410	BHC 150B (2,0)
979071420	BHC 150B (2,3)
979071430	BHC 150B (2,5)
979071440	BHC 150B (2,7)
979071450	BHC 150B (3,0)
979071460	BHC 150B (3,1)
979071470	BHC 150B (3,5)
979071480	BHC 150B (4,0)
979071490	BHC 150B (4,5)
979071500	BHC 150B (5,0)
979071510	BHC 150B (5,5)
979071520	BHC 150B (6,0)
979071530	BHC 180B (0,6)

979071540	BHC 180B (0,7)
979071550	BHC 180B (0,8)
979071560	BHC 180B (1,0)
979071570	BHC 180B (1,4)
979071580	BHC 180B (1,5)
979071590	BHC 180B (1,8)
979071600	BHC 180B (2,0)
979071610	BHC 180B (2,3)
979071620	BHC 180B (2,5)
979071630	BHC 180B (2,7)
979071640	BHC 180B (3,0)
979071650	BHC 180B (3,1)
979071660	BHC 180B (3,5)
979071670	BHC 180B (4,0)
979071680	BHC 180B (4,5)
979071690	BHC 180B (5,0)
979071700	BHC 180B (5,5)
979071710	BHC 180B (6,0)



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior, 437 | Jardim São Paulo
São Carlos/SP | CEP 13570-460 | CNPJ 07.489.080/0001-30

N.º ANVISA: 80356130187

Resp. Téc. Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815

Nome Técnico: Brocas Cirúrgicas

Assistência Técnica: Razek Equipamentos Ltda

Fone: +55 16 2107 2345 | Fax: +55 16 3374 5946



21-MAN-203R Rev.: 00