



Cânula Descartável RZ

Manual do Usuário



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE EO

PRODUTO ESTÉRIL



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO DA FAMÍLIA DA CÂNULA DESCARTÁVEL RZ

A Cântula Descartável RZ é um dispositivo projetado para ser utilizado como guia de passagem da Ponteira Descartável RZ em procedimentos cirúrgicos de rizotomia.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por médicos, que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

- Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)
- Classificação: Regra 6 – Classe II

ESPECIFICAÇÕES

- Esterilizado por: Óxido de Etileno
- Validade da esterilização: 2 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Observar todas as precauções importantes indicadas no Manual do Usuário da Ponteira Descartável RZ;



Antes de utilizar a Cântula Descartável RZ ler atentamente as instruções de uso;



Antes de iniciar qualquer procedimento certifique-se de que todos os materiais necessários encontram-se disponíveis e esterilizados;



Ao manipular o produto durante o procedimento, utilize sempre técnicas assépticas para evitar infecções;



Se a Cântula Descartável RZ apresentar qualquer dano não utilize;



PROIBIDO REPROCESSAR O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;



Não utilizar o produto fora da validade.

CÂNULA DESCARTÁVEL RZ

A Cânula Descartável RZ é composta por:

1 | Obturador: utilizado para a inserção da cânula;

2 | Cânula: A cânula é utilizada como guia de passagem e está disponível em 4 diferentes comprimentos (5 cm, 10 cm, 15 cm, 20 cm).



MODELOS DA FAMÍLIA DA CÂNULA DESCARTÁVEL RZ

▪ **Cânula Descartável RZ 5**

Este modelo apresenta cânula com 5 cm de comprimento.

▪ **Cânula Descartável RZ 10**

Este modelo apresenta cânula com 10 cm de comprimento.

▪ **Cânula Descartável RZ 15**

Este modelo apresenta cânula com 15 cm de comprimento.

▪ **Cânula Descartável RZ 20**

Este modelo apresenta cânula com 20 cm de comprimento.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por óxido de etileno. A esterilização possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- 1** | Preparar o paciente de acordo com técnicas para procedimentos com a Ponteira Descartável RZ;
- 2** | Verifique se o obturador está conectado na cânula;
- 3** | Insira a cânula com o obturador;
- 4** | Retire o obturador da cânula;
- 5** | Insira a Ponteira Descartável RZ;
- 6** | Ao final do procedimento, retire a cânula.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrado e sem sinais de violação;
- O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após o término da vida útil do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o equipamento conforme determina a legislação local. A Cânula Descartável RZ estando fora de uso deve ser prote-

gido contra utilização inadvertida e não qualificada.

VALIDADE

A validade do produto está associada a validade da esterilização, ou seja, dois anos.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação.



Identifica o lote.



Data de validade do produto.



Proibido reprocessar.



Produto esterilizado através de óxido de etileno.



Fabricado por.



Manter seco.



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior,

437 - Jardim São Paulo - São

Carlos/SP Brasil - CEP 13570-460

CNPJ 07.489.080/0001-30

Responsável Técnico: Renaldo

Massini Jr. - CREA SP 0601706815

Registro ANVISA: 80356130153

Nome Técnico: Cãnula

Fone: +55 16 2107 2345

Fax: +55 16 3374 5946

