



# Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração RZFlow

Manual do Usuário



**PROIBIDO  
REPROCESSAR**

**STERILE | R**

**PRODUTO ESTÉRIL**



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

## **FUNÇÃO E INDICAÇÃO**

---

A Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração RZFlow é um dispositivo flexível projetado para proporcionar a irrigação e a aspiração, objetivando a visibilidade e a facilidade da manipulação da instrumentação em procedimentos cirúrgicos artroscópicos.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por médicos, que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

## **ESPECIFICAÇÕES**

---

**Esterilizado por:** Raio Gama

**Validade da esterilização:** 3 anos

## **CONTRA INDICAÇÕES**

---

A Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração RZFlow é contra indicada em procedimentos cirúrgicos não artroscópicos.

## **SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES**

---



Não utilize qualquer componente, que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irão danificar a Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração RZFlow;



Se os componentes apresentarem algum dano, os mesmos não devem ser utilizados;




**NÃO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO.**

## **CÂNULA FLEXÍVEL DE IRRIGAÇÃO E ASPIRAÇÃO RZFLOW**

---

A Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração RZFlow é composta por:

- 1 | Cânula:** a cânula possui uma porção de orifícios que permitem a sucção na região intersticial do tecido;
- 2 | Obturador:** utilizado para a inserção da cânula;
- 3 | Entrada:** pode ser utilizada para a irrigação e aspiração.

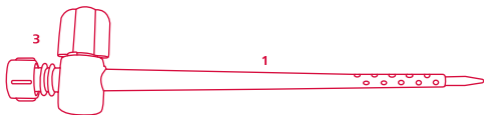


2

## MODELOS

---

### ▪ **Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração RZFlow – Tipo Romba**

Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração com obturador com a ponta tipo romba.

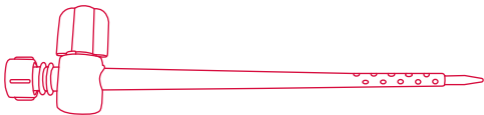

### ▪ **Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração RZFlow – Tipo Cortante**

Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração com obturador com a ponta tipo cortante.



## ESTERILIZAÇÃO

---

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

## PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

---

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante.

## **MODO DE UTILIZAÇÃO**

---

- 1** | Faça uma pequena incisão com o bisturi;
- 2** | Insira o obturador na cânula;
- 3** | Insira a cânula com o obturador na incisão;
- 4** | Retire o obturador da cânula;
- 5** | Verifique, através da visualização artroscópica, se a cânula penetrou completamente no espaço da articulação;
- 6** | Insira o conector de irrigação ou aspiração na entrada da cânula girando-o no sentido horário;
- 7** | Ao final do procedimento, retire a cânula.

## **PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS**

---



**Após o uso da Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração RZFlow, a mesma deverá ser descartada.**

## **ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE**

---

- A Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração RZFlow deve ser transportada em sua embalagem original, lacrado e sem sinais de violação;
- A Cânula Flexível de Irrigação e Aspiração RZFlow segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de

poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

## DESCARTE

---

Após o término da vida útil do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o equipamento conforme determina a legislação local.

## VALIDADE

---

A validade do produto está associada à validade da esterilização, ou seja, três anos.

## SÍMBOLOS UTILIZADOS

---



Data de fabricação



Identifica o lote



Data de validade do produto



Proibido reprocessar



Produto esterilizado através de radiação



Fabricado por



Manter seco



Fabricado por:

**RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA**

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior,  
437 - Jardim São Paulo

São Carlos/SP - CEP 13570-460

CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Téc.: Renaldo Massini Jr.

CREA SP 0601706815

Registro ANVISA: 80356130118

Nome Técnico: Cânula

Assistência Técnica:

Razek Equipamentos Ltda

Fone: +55 16 2107 2345

Fax: +55 16 3374 5946



21-MAN-130R Revisão:00