

Cânula de Aspiração RZFlow

Manual do Usuário



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE EO

**PRODUTO
ESTÉRIL**



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

O Cânula de Aspiração RZFlow é um dispositivo projetado para proporcionar a aspiração, objetivando a visibilidade e a facilidade da manipulação da instrumentação em procedimentos cirúrgicos artroscópicos.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por médicos, que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

ESPECIFICAÇÕES

Esterilizado por: Óxido de Etileno

Validade da esterilização: 2 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Não utilize qualquer componente, que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irão danificar o produto;




Se os componentes apresentarem algum dano, os mesmos não devem ser utilizados;



NÃO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO.

CÂNULA DE ASPIRAÇÃO RZFLOW

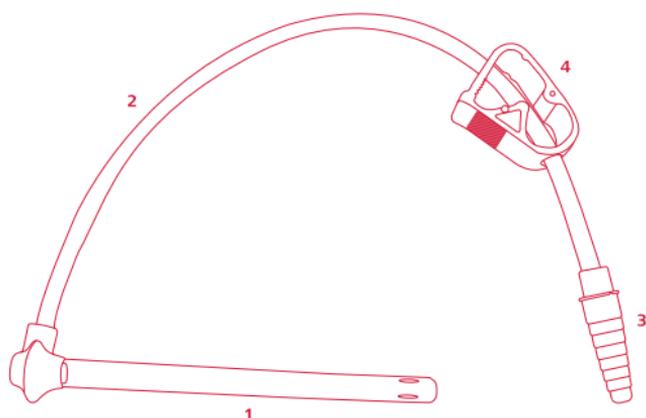

- 1 | Cânula;
- 2 | Tubo de Aspiração;
- 3 | Conector de Aspiração;
- 4 | Presilha.

MODELOS

▪ Cânula de Aspiração RZFlow - 5,8 mm x 113 mm

Cânula de aspiração com comprimento de 113 mm para trocarer com diâmetro externo entre 5,5 e 5,8 mm.

▪ Cânula de Aspiração RZFlow - 5,8 mm x 134 mm

Cânula de aspiração com comprimento de 134 mm para trocarer com diâmetro externo entre 5,5 e 5,8 mm.

▪ Cânula de Aspiração RZFlow - 5,8 mm x 123 mm

Cânula de aspiração com comprimento de 123 mm para trocarer com diâmetro externo entre 5,5 e 5,8 mm.

▪ Cânula de Aspiração RZFlow - 6,3 mm x 113 mm

Cânula de aspiração com comprimento de 113 mm para trocarer com diâmetro externo entre 5,8 e 6,3 mm.

▪ Cânula de Aspiração RZFlow - 6,3 mm x 134 mm

Cânula de aspiração com comprimento de 134 mm para trocarer com diâmetro externo entre 5,8 e 6,3 mm.

▪ **Cânula de Aspiração RZFlow - 6,3 mm x 123 mm**

Cânula de aspiração com comprimento de 123 mm para trocater com diâmetro externo entre 5,8 e 6,3 mm.

▪ **Cânula de Aspiração RZFlow - 6,3 mm x 81 mm**

Cânula de aspiração com comprimento de 81 mm para trocater com diâmetro externo entre 5,8 e 6,3 mm.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante.



Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- 1** | Conecte o Conector de Aspiração no equipamento de aspiração hospitalar padrão. Controle a aspiração desejada através da presilha;
- 2** | Insira o trocater na Cânula;
- 3** | Realize o procedimento cirúrgico.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS

- 1** | Desconecte o conector do equipamento de aspiração hospitalar padrão;
- 2** | Retire o trocater da Cânula.



Após o uso da Cânula de Aspiração RZFlow, a mesma deverá ser descartado.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado por óxido de etileno. A esterilização

possui validade de dois anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrado e sem sinais de violação;
- O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após o término da vida útil do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o equipamento conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está associada à validade da esterilização, ou seja, dois anos.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação



Identifica o lote



Proibido reprocessar



Data de validade do produto



Fabricado por



Produto esterilizado através de óxido de etileno



Manter seco



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior, 437 - Jardim São Paulo
São Carlos/SP - Brasil - CEP 13570-460 - CNPJ 07.489.080/0001-30

Responsável Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815

Registro ANVISA: 80356130117

Nome Técnico: Pontas de Aspirador Cirúrgico

Assistência Técnica: Razek Equipamentos Ltda

Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946

