



# Fio Guia RZ

Manual do Usuário

STERILE R

PRODUTO ESTÉRIL

O FABRICANTE  
RECOMENDA USO ÚNICO

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico **www.razek.com.br**, no menu "Instruções de Uso".

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu nº do registro ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com nosso Pós-Vendas através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail **posvenda1@razek.com.br**.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

## FUNÇÃO E INDICAÇÃO

O Fio Guia RZ tem a função de guiar os instrumentos no portal de acesso para direcionar os instrumentais posteriores.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões, que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

## CLASSIFICAÇÃO

- **Norma/Diretiva:** RDC 185/2001 (ANVISA)
- **Classificação:** Regra 6 - Classe II

## ESPECIFICAÇÕES

- **Esterilizado por:** Raio Gama
- **Validade da esterilização:** 3 anos

## SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Durante os procedimentos cirúrgicos devem-se evitar esforços excessivos, pois os mesmos poderão acarretar em quebra do produto;



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado;



Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;



O operador deverá manipular o Fio Guia RZ com cuidado, pois este pode perfurar as luvas cirúrgicas;



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;



**NÃO REUTILIZAR O PRODUTO,  
POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;**



**PROIBIDO REPROCESSAR.**

## MODELOS

### ▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590010
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590020
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590030
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590040
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590050
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590060
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593680
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593690

### ▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590070
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590080
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590090
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590100
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590110
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590120
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593700
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593710

### ▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593720
Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593730

### ▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593740
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593750

### ▪ Fio Guia RZ Ponta Diamante



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593760
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593770
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593780
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593790

### ▪ Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590130
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590140
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590150
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590160
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590170
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590180







## ESTERILIZAÇÃO

---

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

## PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

---

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante.

## MODO DE UTILIZAÇÃO

---

Os modelos da família do Fio Guia RZ devem ser selecionados e utilizados de acordo com a técnica cirúrgica adotada.

Os critérios para a seleção do modelo é de extrema importância, porque está diretamente ligada ao sucesso da cirurgia. Entretanto, a seleção do modelo a ser utilizado em cada paciente dependerá do diagnóstico e indicação médica;

A forma de uso é inerente à formação do profissional que irá realizar o procedimento. Não existe uma técnica cirúrgica específica para estes produtos indicada pelo fabricante, considerando que possam ser utilizados em vários tipos de procedimentos cirúrgicos. Para a utilização destes produtos, vale a escolha do cirurgião e de sua equipe pela melhor técnica, a depender da finalidade da cirurgia e do local desta.

## PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS

---



**Após o uso do Fio Guia RZ, o fabricante recomenda o descarte do produto.**

## ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

---

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrado e sem sinais de violação;
- O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

## DESCARTE

---

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

## VALIDADE

---

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

## SÍMBOLOS UTILIZADOS

---



Data de fabricação.



Fabricado por.



Identifica o lote.



Produto esterilizado através de radiação.



Data de validade do produto.



Manter seco.



Fabricado por:

**RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA**

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior,  
437 - Jardim São Paulo

São Carlos/SP - CEP 13570-460

CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Téc.: Renaldo Massini Jr.

CREA SP 0601706815

Registro ANVISA: 80356130144

Nome Técnico: Fio Guia

Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345

Fax: +55 16 3374 5946

