



Fio Guia RZ

Manual do Usuário



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE | R

PRODUTO ESTÉRIL

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico **www.razek.com.br**, no menu "Instruções de Uso".

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu nº do registro ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com nosso Pós-Vendas através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail **posvenda1@razek.com.br**.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

O Fio Guia RZ tem a função de guiar os instrumentos no portal de acesso para direcionar os instrumentais posteriores.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões, que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

- **Norma/Diretiva:** RDC 185/2001 (ANVISA)
- **Classificação:** Regra 6 - Classe II

ESPECIFICAÇÕES

- **Esterilizado por:** Raio Gama
- **Validade da esterilização:** 3 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Durante os procedimentos cirúrgicos devem-se evitar esforços excessivos, pois os mesmos poderão acarretar em quebra do produto;



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado;



Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;



O operador deverá manipular o Fio Guia RZ com cuidado, pois este pode perfurar as luvas cirúrgicas;



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;



**NÃO REUTILIZAR O PRODUTO,
POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;**



PROIBIDO REPROCESSAR.

MODELOS

▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590010
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590020
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590030
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590040
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590050
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590060
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 100 mm	1,4 mm	100 mm	742593900
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 130 mm	1,4 mm	130 mm	742593910
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 150 mm	1,4 mm	150 mm	742593920
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 230 mm	1,4 mm	230 mm	742593930
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,4 x 300 mm	1,4 mm	300 mm	742593940
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593680
Fio Guia RZ Ponta Trocar - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593690

▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590070
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590080
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590090
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590100
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590110
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590120
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 100 mm	1,4 mm	100 mm	742593950
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 130 mm	1,4 mm	130 mm	742593960
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 150 mm	1,4 mm	150 mm	742593970
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 230 mm	1,4 mm	230 mm	742593980
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,4 x 300 mm	1,4 mm	300 mm	742593990
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593700
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593710

▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593720
Fio Guia RZ Ponta Trocar com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593730

▪ Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593740
Fio Guia RZ Ponta Trocar Dupla com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593750

▪ Fio Guia RZ Ponta Diamante



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593760
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593770
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593780
Fio Guia RZ Ponta Diamante - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593790

• Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 100 mm	0,9 mm	100 mm	742590130
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 150 mm	0,9 mm	150 mm	742590140
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 0,9 x 180 mm	0,9 mm	180 mm	742590150
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 100 mm	1,1 mm	100 mm	742590160
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 150 mm	1,1 mm	150 mm	742590170
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,1 x 180 mm	1,1 mm	180 mm	742590180
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 100 mm	1,4 mm	100 mm	742594000
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 130 mm	1,4 mm	130 mm	742594010
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 150 mm	1,4 mm	150 mm	742594020
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,4 x 230 mm	1,4 mm	230 mm	742594030
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,6 x 150 mm	1,6 mm	150 mm	742593800
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 1,6 x 230 mm	1,6 mm	230 mm	742593810
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593820
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593830

• Fio Guia RZ Ponta Diamante com Rosca



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593840
Fio Guia RZ Ponta Diamante com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593850

• Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla com Rosca



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla com Rosca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742593860
Fio Guia RZ Ponta Diamante Dupla com Rosca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742593870

• Fio Guia RZ Ponta Broca



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742590190
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742590200
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 200 mm	2,5 mm	200 mm	742590210
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 200 mm	2,8 mm	200 mm	742590220
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 200 mm	3,0 mm	200 mm	742590230
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 200 mm	3,2 mm	200 mm	742590240
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 230 mm	2,0 mm	230 mm	742590250
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 230 mm	2,4 mm	230 mm	742590260
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 230 mm	2,5 mm	230 mm	742590270
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 230 mm	2,8 mm	230 mm	742590280
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 230 mm	3,0 mm	230 mm	742590290
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 230 mm	3,2 mm	230 mm	742590300
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 230 mm	3,5 mm	230 mm	742590310
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 250 mm	2,0 mm	250 mm	742590320
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 250 mm	2,4 mm	250 mm	742590330
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742590340
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 250 mm	2,8 mm	250 mm	742590350
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742590360
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 250 mm	3,2 mm	250 mm	742590370
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 250 mm	3,5 mm	250 mm	742590380
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742590390
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742590400
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742590410
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 300 mm	2,8 mm	300 mm	742590420
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742590430
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 300 mm	3,2 mm	300 mm	742590440
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 300 mm	3,5 mm	300 mm	742590450
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742590460
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742590470
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742590480
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 350 mm	2,8 mm	350 mm	742590490
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742590500
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 350 mm	3,2 mm	350 mm	742590510
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 350 mm	3,5 mm	350 mm	742590520
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742590530
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742590540
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742590550
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 400 mm	2,8 mm	400 mm	742590560
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742590570
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 400 mm	3,2 mm	400 mm	742590580
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 400 mm	3,5 mm	400 mm	742590590
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742590600
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742590610
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742590620
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 450 mm	2,8 mm	450 mm	742590630
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742590640
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 450 mm	3,2 mm	450 mm	742590650
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 450 mm	3,5 mm	450 mm	742590660
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742590670
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742590680
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742590690
Fio Guia RZ Ponta Broca - 2,8 x 500 mm	2,8 mm	500 mm	742590700
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742590710
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,2 x 500 mm	3,2 mm	500 mm	742590720
Fio Guia RZ Ponta Broca - 3,5 x 500 mm	3,5 mm	500 mm	742590730

• Fio Guia RZ Calibrado



Modelos	Diâmetro	Comprimento	Código
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 50 mm	0,8 mm	50 mm	742590740
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 50 mm	1,0 mm	50 mm	742590750
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 50 mm	1,2 mm	50 mm	742590760
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 50 mm	1,5 mm	50 mm	742590770
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 50 mm	2,0 mm	50 mm	742590780
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 50 mm	2,4 mm	50 mm	742590790
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 80 mm	0,8 mm	80 mm	742590800
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 80 mm	1,0 mm	80 mm	742590810
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 80 mm	1,2 mm	80 mm	742590820
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 80 mm	1,5 mm	80 mm	742590830
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 80 mm	2,0 mm	80 mm	742590840
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 80 mm	2,4 mm	80 mm	742590850
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 100 mm	0,8 mm	100 mm	742590860
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 100 mm	1,0 mm	100 mm	742590870
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 100 mm	1,2 mm	100 mm	742590880
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 100 mm	1,5 mm	100 mm	742590890
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 100 mm	2,0 mm	100 mm	742590900
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 100 mm	2,4 mm	100 mm	742590910
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 120 mm	0,8 mm	120 mm	742590920
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 120 mm	1,0 mm	120 mm	742590930
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 120 mm	1,2 mm	120 mm	742590940
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 120 mm	1,5 mm	120 mm	742590950
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 120 mm	2,0 mm	120 mm	742590960
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 120 mm	2,4 mm	120 mm	742590970
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 150 mm	0,8 mm	150 mm	742590980
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 150 mm	1,0 mm	150 mm	742590990
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 150 mm	1,2 mm	150 mm	742591000
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 150 mm	1,5 mm	150 mm	742591010
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 150 mm	2,0 mm	150 mm	742591020
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 150 mm	2,4 mm	150 mm	742591030
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 200 mm	0,8 mm	200 mm	742591040
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 200 mm	1,0 mm	200 mm	742591050
Fio Guia RZ Calibrado - 1,2 x 200 mm	1,2 mm	200 mm	742591060
Fio Guia RZ Calibrado - 1,5 x 200 mm	1,5 mm	200 mm	742591070
Fio Guia RZ Calibrado - 2,0 x 200 mm	2,0 mm	200 mm	742591080
Fio Guia RZ Calibrado - 2,4 x 200 mm	2,4 mm	200 mm	742591090
Fio Guia RZ Calibrado - 0,8 x 230 mm	0,8 mm	230 mm	742591100
Fio Guia RZ Calibrado - 1,0 x 230 mm	1,0 mm	230 mm	742591110

Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 250 mm	2,5 mm	250 mm	742593460
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 250 mm	3,0 mm	250 mm	742593470
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 300 mm	2,0 mm	300 mm	742593480
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 300 mm	2,4 mm	300 mm	742593490
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 300 mm	2,5 mm	300 mm	742593500
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 300 mm	3,0 mm	300 mm	742593510
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 350 mm	2,0 mm	350 mm	742593520
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 350 mm	2,4 mm	350 mm	742593530
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 350 mm	2,5 mm	350 mm	742593540
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 350 mm	3,0 mm	350 mm	742593550
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 400 mm	2,0 mm	400 mm	742593560
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 400 mm	2,4 mm	400 mm	742593570
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 400 mm	2,5 mm	400 mm	742593580
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 400 mm	3,0 mm	400 mm	742593590
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 450 mm	2,0 mm	450 mm	742593600
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 450 mm	2,4 mm	450 mm	742593610
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 450 mm	2,5 mm	450 mm	742593620
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 450 mm	3,0 mm	450 mm	742593630
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,0 x 500 mm	2,0 mm	500 mm	742593640
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,4 x 500 mm	2,4 mm	500 mm	742593650
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 2,5 x 500 mm	2,5 mm	500 mm	742593660
Fio Guia RZ Quatro Furos Ponta Diamante - 3,0 x 500 mm	3,0 mm	500 mm	742593670

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Os modelos da família do Fio Guia RZ devem ser selecionados e utilizados de acordo com a técnica cirúrgica adotada.

Os critérios para a seleção do modelo é de extrema importância, porque está diretamente ligada ao sucesso da cirurgia. Entretanto, a seleção do modelo a ser utilizado em cada paciente dependerá do diagnóstico e indicação médica.

A forma de uso é inerente à formação do profissional que irá realizar o procedimento. Não existe uma técnica cirúrgica específica para estes produtos indicada pelo fabricante, considerando que possam ser utilizados em vários tipos de procedimentos cirúrgicos. Para a utilização destes produtos, vale a escolha do cirurgião e de sua equipe pela melhor técnica, a depender da finalidade da cirurgia e do local desta.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS



Após o uso do Fio Guia RZ, o mesmo deverá ser descartado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrado e sem sinais de violação;
- O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação



Identifica o lote



Data de validade do produto



Proibido reprocessar



Produto esterilizado através de radiação



Fabricado por



Manter seco



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior,
437 - Jardim São Paulo

São Carlos/SP - CEP 13570-460

CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Téc.: Renaldo Massini Jr.

CREA SP 0601706815

Registro ANVISA: 80356130144

Nome Técnico: Fio Guia

Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345

Fax: +55 16 3374 5946

