



Malha de Tração Foot RZ

Manual do Usuário



**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE R

PRODUTO ESTÉRIL



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A Malha de Tração Foot RZ é um dispositivo projetado para a distribuição do peso do pé possibilitando ao cirurgião posicionar o paciente de acordo com a exigência dos procedimentos cirúrgicos de pé e tornozelo.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por médicos, que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

ESPECIFICAÇÕES

Esterilizado por: Raio Gama

Validade da esterilização: 3 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Não utilize qualquer componente, que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irão danificar o produto;



Se os componentes apresentarem algum dano, os mesmos não devem ser utilizados;




Não utilize qualquer componente, que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irá danificar a Broca Diamantada HPF;



NÃO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO.

MALHA DE TRAÇÃO FOOT RZ

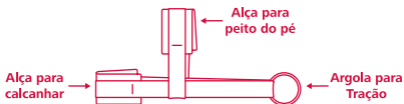

MODELO

- Malha de Tração Foot RZ - U

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspeccione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do Fabricante.



Abrir a embalagem utilizando técnica asséptica.

MODO DE UTILIZAÇÃO

- 1** | Insira a **Alça para Calcanhar** no calcanhar do paciente;
- 2** | Insira a **Alça para Peito do Pé** no peito do pé do paciente;



- 3** | Prenda a Argola de Tração no equipamento que realizará a tração na Malha de Tração Foot RZ;
- 4** | Realize o procedimento cirúrgico;
- 5** | Ao final do procedimento, retire a Malha de Tração Foot RZ do paciente.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS



Após o uso da Malha de Tração Foot RZ, a mesma deverá ser descartada.

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrado e sem sinais de violação;

- O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após o término da vida útil do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o equipamento conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto é de três anos.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação



Identifica o lote



Data de validade do produto



Proibido reprocessar



Produto esterilizado através de radiação



Fabricado por



Manter seco



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Rua Ernesto Gonçalves Rosa Junior,
437 - Jardim São Paulo

São Carlos/SP - CEP 13570-460

CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Téc.: Renaldo Massini Jr.

CREA SP 0601706815

Registro ANVISA: 80356130146

Nome Técnico: Outros de Apoio

Médico-Hospitalar

Assistência Técnica:

Razek Equipamentos Ltda

Fone: +55 16 2107 2345

Fax: +55 16 3374 5946

