



Trocater RZ

NON|STERILE

**PRODUTO
NÃO ESTÉRIL**

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu “Instruções de Uso”.

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Venda através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A família de Trocater RZ tem por finalidade a condução de instrumentos cirúrgicos invasivos, permitindo a manipulação destes, bem como irrigar e succionar líquidos ou mesmo insuflar gases para o interior de cavidades em procedimentos artroscópicos.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

CLASSIFICAÇÃO

- Norma/Diretiva: RDC 185/2001 (ANVISA)
- Classificação: Regra 6 – Classe I

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Se os componentes apresentarem algum dano, os mesmos não devem ser utilizados;



A reutilização do Trocater RZ poderá ser realizada se o mesmo estiver em bom estado e apresentar boas condições de limpeza;



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



Durante os procedimentos cirúrgicos, devem-se evitar esforços excessivos, pois os mesmos poderão acarretar a quebra do instrumento;



O operador deverá manipular o Trocater RZ com cuidado, pois o mesmo pode perfurar luvas cirúrgicas;



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado;



Nunca utilize o Trocater RZ sem antes ter realizado uma limpeza e uma esterilização adequadas;




Não force o instrumento se for encontrada resistência durante a inserção. Forçar o ins-

trumento pode danificá-lo, além de causar lesões ao paciente, tais como perfurações, hemorragias ou danos aos tecidos.


TROCATER RZ

O Trocater RZ é composto por:

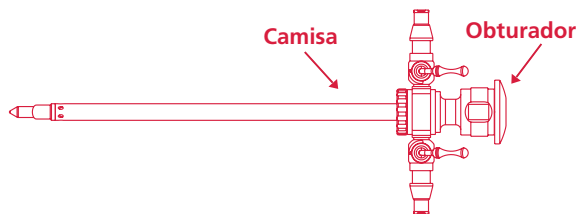

▪ Camisa:

A camisa possui 1 ou 2 conectores com torneiras, destinados aos acoplamentos de tubos que poderão, dependendo da necessidade médica, insuflar gases (CO₂, NO₃, e etc.) ou irrigar/succionar líquidos (soro fisiológico, etc.).

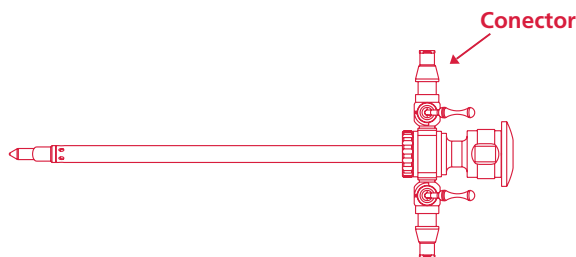

▪ Obturador:

O obturador é um instrumento metálico usado em processos de ressecção cirúrgica com a finalidade de permitir a introdução da camisa sem produzir danos aos tecidos das paredes. Pode apresentar os seguintes tipos de pontas: Romba, Perfurante, Romba Canulada e Pontiguada.




MODELOS TROCATER RZ

A família de Trocater RZ é composta de modelos com comprimentos e angulações

das extremidades das camisas diferentes, que dependem das necessidades do profissional. Cada modelo foi desenvolvido para uma finalidade específica durante a cirurgia.

▪ Trocater RZ

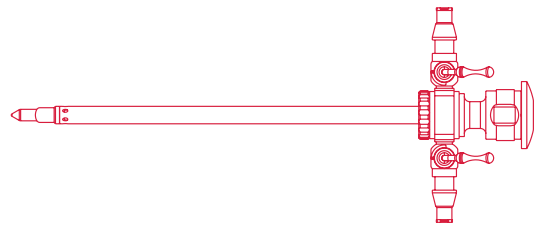

- Comprimentos disponíveis: 65 - 80 - 110 - 175 mm
- Ângulos disponíveis: 0° - 30° - 70°
- Diâmetros disponíveis: 2,7 - 4,0 mm
- Ponta do Obturador: Romba, Perfurante e Romba Canulada
- Torneira: Duas
- Camisa Simples
- Modelos disponíveis:
 - 700400900 - Trocater RZ 0° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Romba
 - 700401000 - Trocater RZ 30° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Romba
 - 700401100 - Trocater RZ 70° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Romba
 - 700401200 - Trocater RZ 0° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Romba Canulada
 - 700401300 - Trocater RZ 30° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Romba Canulada
 - 700401400 - Trocater RZ 70° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Romba Canulada
 - 700401500 - Trocater RZ 0° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Perfurante
 - 700401600 - Trocater RZ 30° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Perfurante
 - 700401700 - Trocater RZ 70° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Perfurante

700401800 - Trocater RZ 0° x 65 mm x 2,7 mm - Obturador Ponta Romba

700401900 - Trocater RZ 30° x 65 mm x 2,7 mm - Obturador Ponta Romba


700402000 - Trocater RZ 0° x 80 mm x 2,7 mm - Obturador Ponta Romba

700402100 - Trocater RZ 30° x 80 mm x 2,7 mm - Obturador Ponta Romba

700402200 - Trocater RZ 0° x 110 mm x 2,7 mm - Obturador Ponta Romba

700402300 - Trocater RZ 30° x 110 mm x 2,7 mm - Obturador Ponta Romba

▪ Trocater RZ Longo

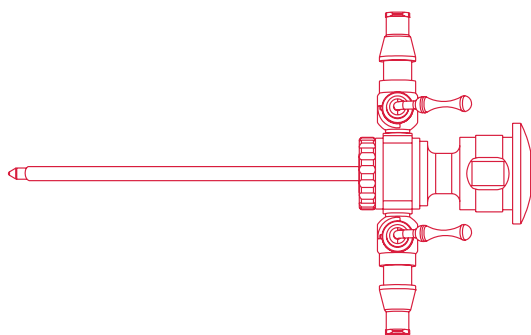

▪ Comprimentos disponíveis: 275 mm

▪ Ângulos disponíveis: 0° - 30°

▪ Diâmetros disponíveis: 2,0 mm

▪ Ponta do Obturador: Romba

▪ Torneira: Duas


▪ Camisa Simples

▪ Modelos disponíveis:

700450000 - Trocater RZ Longo 0° x 275 mm x 2,0 mm - Obturador Ponta Romba

700450100 - Trocater RZ Longo 30° x 275 mm x 2,0 mm - Obturador Ponta Romba

▪ Trocater RZ ATM

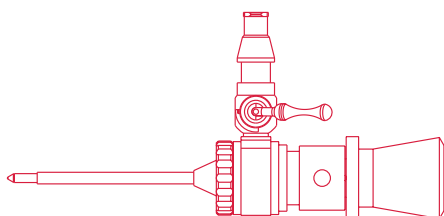

▪ Comprimentos disponíveis: 65 - 80 - 110 mm

▪ Ângulos disponíveis: 0° - 30°

▪ Diâmetros disponíveis: 1,9 - 2,3 mm

▪ Ponta do Obturador: Romba e Pontiaguda

▪ Torneira: Uma

▪ Camisa Simples

▪ Modelos disponíveis:

700410900 - Trocater RZ ATM 0° x 65 mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Romba

700411000 - Trocater RZ ATM 30° x 65mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Romba

700411100 - Trocater RZ ATM 0° x 80 mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Romba

700411200 - Trocater RZ ATM 30° x 80 mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Romba

700411300 - Trocater RZ ATM 0° x 110 mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Romba

700411400 - Trocater RZ ATM 30° x 110 mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Romba

700411500 - Trocater RZ ATM 0° x 65 mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Pontiaguda

700411600 - Trocater RZ ATM 30° x 65 mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Pontiaguda

700411700 - Trocater RZ ATM 0° x 80 mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Pontiaguda

700411800 - Trocater RZ ATM 30° x 80 mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Pontiaguda

700411900 - Trocater RZ ATM 0° x 110 mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Pontiaguda

700412000 - Trocater RZ ATM 30° x 110 mm x 1,9 mm - Obturador Ponta Pontiaguda

700412100 - Trocater RZ ATM 0° x 65 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Romba

700412200 - Trocater RZ ATM 30° x 65 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Romba

700412300 - Trocater RZ ATM 0° x 80 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Romba

700412400 - Trocater RZ ATM 30° x 80 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Romba

700412500 - Trocater RZ ATM 0° x 110 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Romba

700412600 - Trocater RZ ATM 30° x 110 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Romba

700412700 - Trocater RZ ATM 0° x 65 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Pontiaduda

700412800 - Trocater RZ ATM 30° x 65 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Pontiaduda


700412900 - Trocater RZ ATM 0° x 80 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Pontiaduda

700413000 - Trocater RZ ATM 30° x 80 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Pontiaduda

700413100 - Trocater RZ ATM 0° x 110 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Pontiaduda

700413200 - Trocater RZ ATM 30° x 110 mm x 2,3 mm - Obturador Ponta Pontiaduda

▪ Trocater RZ Intercambiável

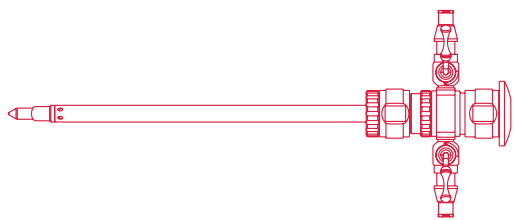

Comprimentos disponíveis: 175 mm

Ângulos disponíveis: 30° - 70°

Diâmetros disponíveis: 4,0 mm

Ponta do Obturador: Romba

Torneira: Duas

Camisa Simples

Modelos disponíveis:

700420900 - Trocater RZ Intercambiável 30° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Romba

700421000 - Trocater RZ Intercambiável 70° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Romba

700421100 - Trocater RZ Intercambiável 30° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta

Romba Canulada

700421200 - Trocater RZ Intercambiável 70° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Romba Canulada

700421300 - Trocater RZ Intercambiável 30° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Perfurante

700421400 - Trocater RZ Intercambiável 70° x 175 mm x 4,0 mm - Obturador Ponta Perfurante


PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

- Antes do uso do Trocater RZ certifique-se que este foi esterilizado adequadamente;
- Inspeccione os instrumentos, verificando se há danos antes do uso;
- Se for detectado algum dano, não use o dispositivo antes de consultar as orientações do fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO


▪ Modelos: Trocater RZ, Trocater RZ Longo e Trocater RZ Intercambiável.

1. Após a esterilização, retire o trocater da embalagem estéril utilizando técnica asséptica;
2. Verifique se as torneiras dos conectores estão fechadas;

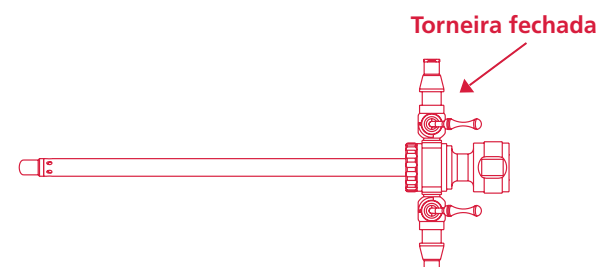


3. Pressione o botão para baixo e insira o obturador na camisa até o final, solte o botão e verifique se o mesmo está conectado na camisa;
4. Insira o trocater na incisão;


5. Para remover o obturador, pressione o botão para baixo e retire o obturador;

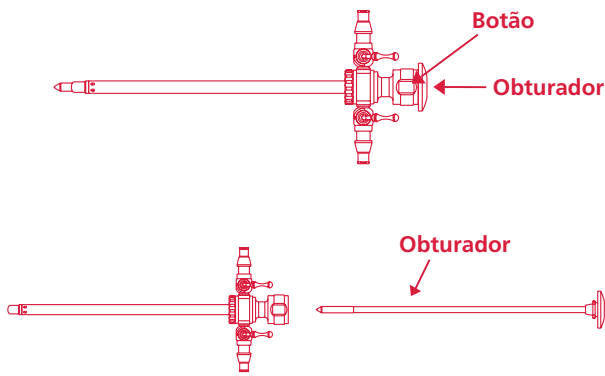

6. Caso seja necessário insuflar gases ou irrigar/succionar líquidos deve-se acoplar os tubos nos conectores da camisa com a torneira fechada;

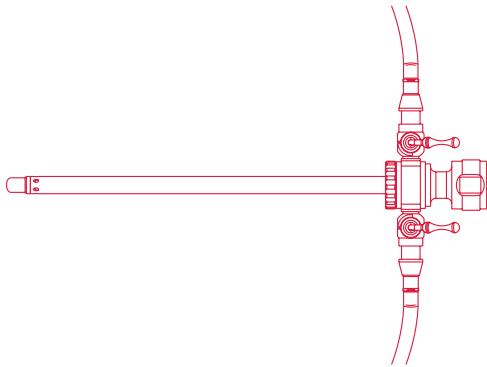

7. Em seguida, abra a torneira, girando a torneira número 1 no sentido anti-horário e a torneira número 2 no sentido horário;

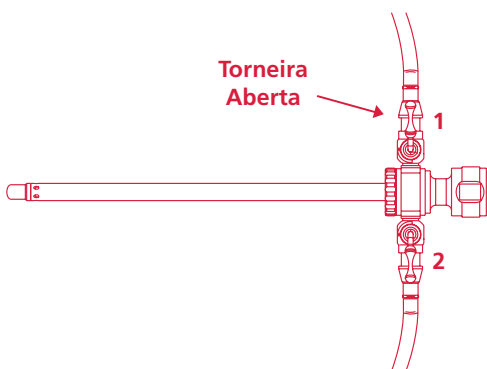


8. Ao final do procedimento, retire o Trocater RZ da incisão.

▪ **Modelo: Trocater RZ ATM.**


1. Após a esterilização, retire o trocater da embalagem estéril utilizando técnica asséptica;

2. Verifique se a torneira do conector está fechada;

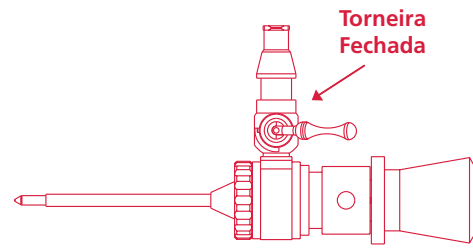


3. Insira o Trocater RZ na incisão;


4. Gire a alavanca no sentido horário e retire o obturador da camisa;

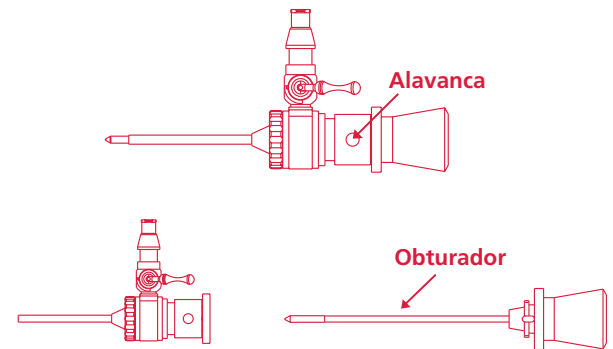

5. Caso seja necessário insuflar gases ou irrigar/succionar líquidos deve-se acoplar o tubo no conector da camisa com a torneira fechada;

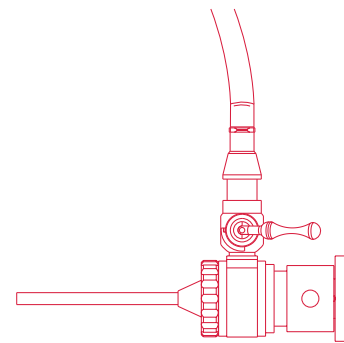

6. Em seguida, abra a torneira, girando no sentido anti-horário;

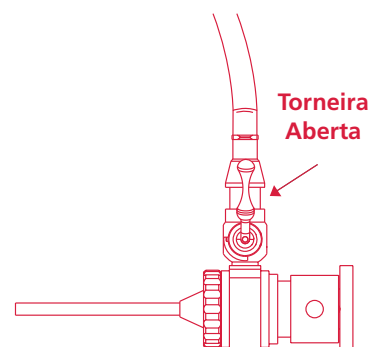

7. Ao final do procedimento, retire ao Trocater RZ da incisão.


LIMPEZA E DESINFECÇÃO DO TROCATER RZ

LIMPEZA

1. Remova do instrumental a sujeira ressecada, especialmente em áreas tais como juntas ou fendas antes de lavar;


Obs.: O enxágue e limpeza imediatos após o uso, com detergente enzimático ou alcalino, removerá a sujeira efetivamente e evitará que sangue, muco, ou outras secreções, fiquem grudadas.

2. Escove toda a superfície do produto com uma escova macia, prestando especial atenção a áreas onde possam se acumular fragmentos;

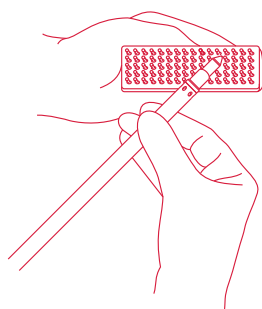


Obs.: Sempre evite o uso de qualquer material áspero que possa arranhar ou danificar a superfície do instrumento.

3. Enxague o produto cuidadosamente com água corrente;

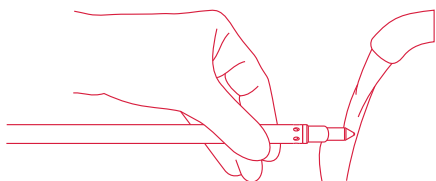

Obs.: Verifique se há sujeira visível no instrumento. Repita a limpeza se houver sujeira visível e inspecione novamente.

4. Com uma toalha de papel ou uma pistola de ar, retire o excesso de água;

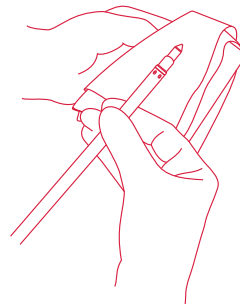

5. Envie o instrumental para a esterilização.

DESINFECÇÃO (OPCIONAL)

Abaixo segue uma descrição onde constam alguns parâmetros de lavagem e desinfecção para hospitais que utilizam este dispositivo para tal fim. Esta etapa não é obrigatória. Os itens definidos podem ser modificados com base no protocolo padrão de limpeza-desinfecção do hospital.

A temperatura e o tempo de lavagem-desinfecção recomendados são:

- Pré-lavagem: Temperatura: (35 °C) e Tempo: 5 minutos;
- Lavagem principal: Temperatura: (93 °C) e Tempo: 30 minutos;
- Neutralização: Tempo: 2 minutos;
- Lavagem final: Temperatura: (65 °C) e Tempo: 10 minutos.

Obs.: A utilização de equipamentos para lavagem-desinfecção poderá causar uma degradação prematura do desempenho do Trocater RZ.

ESTERILIZAÇÃO

O Trocater RZ deve ser esterilizado antes de sua utilização.

A seguir estão ilustrados alguns tipos de esterilizações possíveis, a temperatura e o tempo recomendado para cada pro-

cedimento:

Óxido de Etileno: 53-57 °C por 4 horas (Arejamento 18 horas);

Autoclave: 132-134 °C por 15 minutos.

AVISO:

- Os tipos de esterilização citados acima são apenas orientações recomendadas e poderão variar entre hospitais, dependendo do tipo de equipamento de esterilização e dos agentes patogênicos que possam existir na respectiva área. Os parâmetros de esterilização recomendados podem ser modificados com base no protocolo padrão de esterilização do hospital;
- Os instrumentos não saem esterilizados da empresa;
- A cada reutilização, uma nova esterilização deve ser realizada;
- Nunca esterilize o instrumento com formalina.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O Trocater RZ deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação. Estocar em local fresco e seco, distante de poeira e umidade.

DESCARTE

Após o término da vida útil do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o Trocater RZ conforme determina a legislação local.

GARANTIA

O produto possui garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. A garantia

NÃO cobre o desgaste dos instrumentais, o qual ocorre durante os procedimentos cirúrgicos.

VALIDADE

O produto possui validade indeterminada e a data de fabricação está descrita na embalagem externa.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação



Identifica o número de série



Data de validade do produto



Fabricado por



Manter seco



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I
São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30

Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815

n.º ANVISA: 80356130104 - Nome Técnico: Trocater

Atendimento ao Consumidor:

Fone: +55 16 2107 2345 - Fax: +55 16 3374 5946



21-MAN-117R Rev.:01