



Arthrocut Razel



USO ÚNICO

**PROIBIDO
REPROCESSAR**

STERILE | R

PRODUTO ESTÉRIL

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek em acordo com a IN nº 4 / 2012 estabelecida pela ANVISA, disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu “Instruções de Uso”.

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Venda através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A família Arthrocut Razek tem por finalidade fornecer ao cirurgião os instrumentos necessários para cortar tecidos em procedimentos cirúrgicos artroscópicos.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

ESPECIFICAÇÕES

Esterilizado por: Raio Gama

Validade da esterilização: 3 anos

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Não use o produto com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado;



Se o produto apresentar algum dano, o mesmo não deve ser utilizado;



O operador deverá manipular o produto com cuidado, pois estes podem perfurar luvas cirúrgicas;



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



O uso de qualquer parte, acessório ou material não especificado é de inteira responsabilidade do usuário;




**NÃO REUTILIZE O PRODUTO, POIS O
MESMO É DE USO ÚNICO;**



PROIBIDO REPROCESSAR.

ARTHROCUT RAZEK

O Arthrocut Razek é composto por:

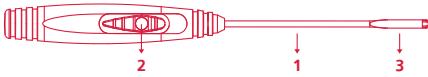

1. Haste
2. Botão de acionamento
3. Ponta cortante

MODELOS

▪ Arthrocut Razeq Banana 110
(Código: 742532500)

▪ Arthrocut Razeq Banana 170
(Código: 742530200)

▪ Arthrocut Razeq Banana 220
(Código: 742530300)



▪ Arthrocut Razeq 2 - Sided Point 110
(Código: 742530400)

▪ Arthrocut Razeq 2 - Sided Point 170
(Código: 742530500)

▪ Arthrocut Razeq 2 - Sided Point 220
(Código: 742530600)



▪ Arthrocut Razeq 2 - Sided Round 110
(Código: 742530700)

▪ Arthrocut Razeq 2 - Sided Round 170
(Código: 742530800)

▪ Arthrocut Razeq 2 - Sided Round 220
(Código: 742530900)



▪ Arthrocut Razeq Mini Meniscus 110
(Código: 742531000)

▪ Arthrocut Razeq Mini Meniscus 170
(Código: 742531100)

▪ Arthrocut Razeq Mini Meniscus 220
(Código: 742531200)



▪ Arthrocut Razeq Crescent 110
(Código: 742531300)

▪ Arthrocut Razeq Crescent 170
(Código: 742531400)

▪ Arthrocut Razeq Crescent 220
(Código: 742531500)



▪ Arthrocut Razeq Hook 110
(Código: 742531600)

▪ Arthrocut Razeq Hook 170
(Código: 742531700)

▪ Arthrocut Razeq Hook 220
(Código: 742531800)



▪ Arthrocut Razeq Retro 110
(Código: 742531900)

▪ Arthrocut Razeq Retro 170
(Código: 742532000)

▪ Arthrocut Razeq Retro 220
(Código: 742532100)



▪ Arthrocut Razeq Rosette 110
(Código: 742532200)

▪ Arthrocut Razeq Rosette 170
(Código: 742532300)

▪ Arthrocut Razeq Rosette 220
(Código: 742532400)



ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO

Os modelos da família Arthrocut Razek devem ser selecionados e utilizados de acordo com a técnica cirúrgica adotada.

Os critérios para a seleção do modelo são extremamente importantes, pois estão diretamente ligados ao sucesso da cirurgia. A seleção do modelo a ser usado em cada paciente dependerá de diagnóstico e indicação médica.

A forma de uso é inerente à formação do profissional que irá realizar o procedimento. Não existe uma técnica cirúrgica específica para estes produtos indicada pelo fabricante, considerando que possam ser utilizados em vários tipos de procedimentos cirúrgicos. Para a utilização destes produtos, vale a escolha do cirurgião e de sua equipe pela melhor técnica, a depender da finalidade da cirurgia e do local desta.

PROCEDIMENTOS PÓS-OPERATÓRIOS



Após o uso do Arthrocut Razek, o mesmo deverá ser descartado.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrado e sem sinais de violação;

O produto segue em uma embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;

Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Cuidado



Consultar as instruções
de uso



Data de fabricação



Código de lote



Prazo de validade



Esterilizado
utilizando irradiação



Uso único



Fabricante



Proteger
de luz solar



Manter seco



Frágil



Este lado para cima



Fabricado por:

RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I
São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30
Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815
n.º ANVISA: 80356130115 - Nome Técnico: Instrumentos
Cirúrgicos - Assistência Técnica: Fone: +55 16 2107 2345



21-MAN-110R Rev.:03