

# Instrumentais para Parafuso Snap Off Razek

## Chave para Parafusos Snap Off

Código: 490060230

## CXIM 002

(Código: 700436000)

Dimensões: 318 x 202 x 71,5 mm


Caixa com divisões internas para armazenamento de Instrumental para Parafusos Snap Off

## Pinça Adson com Serrilha

Código: 490060180

## Pinça Auto Centrante

Código: 490060190

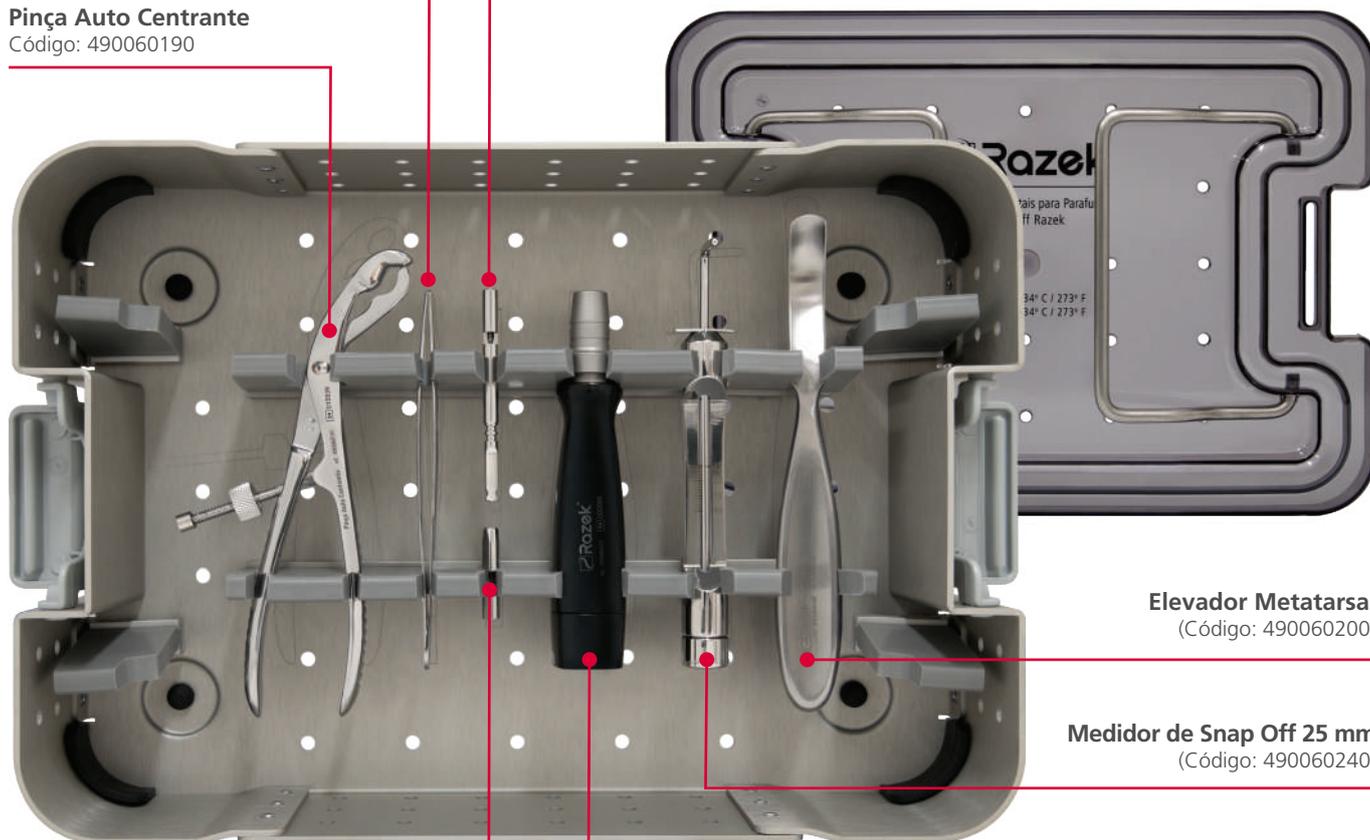

## Elevador Metatarsal

(Código: 490060200)

## Medidor de Snap Off 25 mm

(Código: 490060240)

## Cabo Engate Rápido 4,5 mm

Código: 490060210

n.º ANVISA: 80356130177

Imagens meramente ilustrativas

## Chave para Parafusos Snap Off Encaixe Mandril

Código: 490061070



## CXIM 020

(Código: 700437900)

Dimensões: 300 x 184 x 12,7 mm

Caixa com divisões internas para armazenamento de Parafusos Snap Off Razek.

**OBS.:** Os parafusos não fazem parte da caixa e devem ser adquiridos separadamente.

## INDICAÇÕES DE USO

A Família de Parafuso Snap Off Razek é indicada para fixação de fraturas ou reconstrução óssea como:

- Fixação de pequenos fragmentos ósseos;
- Osteotomia de Weil;
- Fixação Monocortical;
- Osteotomias e fixação de fratura no pé e mão.

## Sugestão de uso Parafuso Snap Off

**1** | Realize incisão cirúrgica para exposição adequada da região a ser realizada a osteotomia. Caso necessário, pode-se utilizar o Elevador Metatarsal para melhor visualização das superfícies ósseas;

Instrumental	Código
Elevador Metatarsal	490060200




**2** | Utilize uma Micro Serra Sagittal, com lâmina reta e estreita, para realizar osteotomias em forma de V, linear oblíquo ou em Z, para correção da deformidade ou desvio ósseo, mantendo o contato interfragmentário;



**3** | Para uma segura estabilização dos fragmentos, utilize a Pinça Auto Centrante de redução de fraturas;

Instrumental	Código
Pinça Auto Centrante	490060190

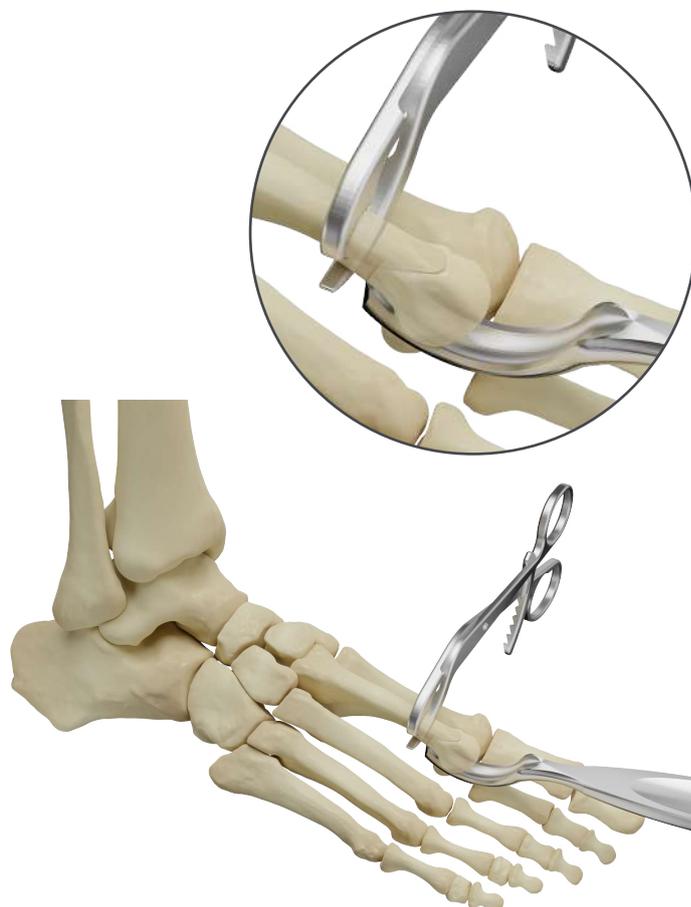

**4** | Após assegurar o posicionamento interfragmentário desejado, meça o comprimento ósseo com Medidor de Snap Off 25 mm, a fim de determinar o comprimento do parafuso Snap Off Razek a ser utilizado. O cirurgião deve escolher um comprimento de parafuso de maneira que o mesmo não transpasse a cortical distal e lese as partes moles.


Nota: O comprimento e o diâmetro do parafuso podem ser aferidos em escala específica contida na bandeja da Caixa de Esterilização. A medida do comprimento deve ser obtida na extremidade distal do parafuso;

Instrumental	Código
Medidor de Snap Off 25 mm	490060240



**5** | Insira e fixe o parafuso na chave escolhida. Realize a perfuração óssea de maneira a ultrapassar o foco da osteotomia e aproximar a cabeça plana do parafuso à superfície óssea, a fim de obter auto compressão interfragmentária;

**Nota:** a inserção do Parafuso Snap Off Razek poderá ser realizada de forma Manual ou Mecânica.

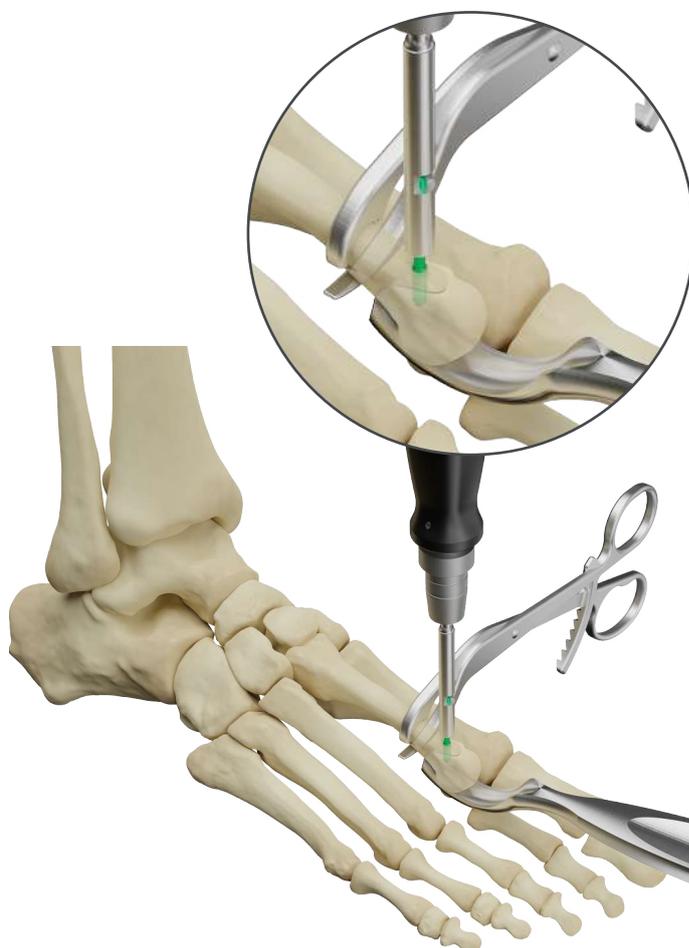


**Manual:** Utilize a Chave para Parafusos Snap Off acoplada ao Cabo Engate Rápido 4,5 mm;

Instrumental	Código
Chave para Parafusos Snap Off	490060230
Cabo Engate Rápido 4,5 mm	490060210




**Mecânica:** Utilize a Chave para Parafusos Snap Off Razek Encaixe Mandril acoplada ao mandril do perfurador escolhido. É importante utilizar velocidade moderada e um posicionamento firme do perfurador, a fim de evitar quebra antecipada do parafuso e/ou fraturas extras dos fragmentos.

Instrumental	Código
Chave para Parafusos Snap Off Encaixe Mandril	490061070

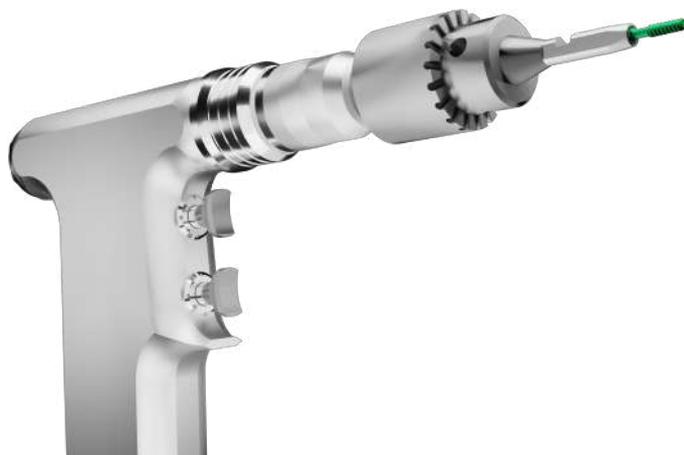

**6 |** Verifique a correta fixação do parafuso;

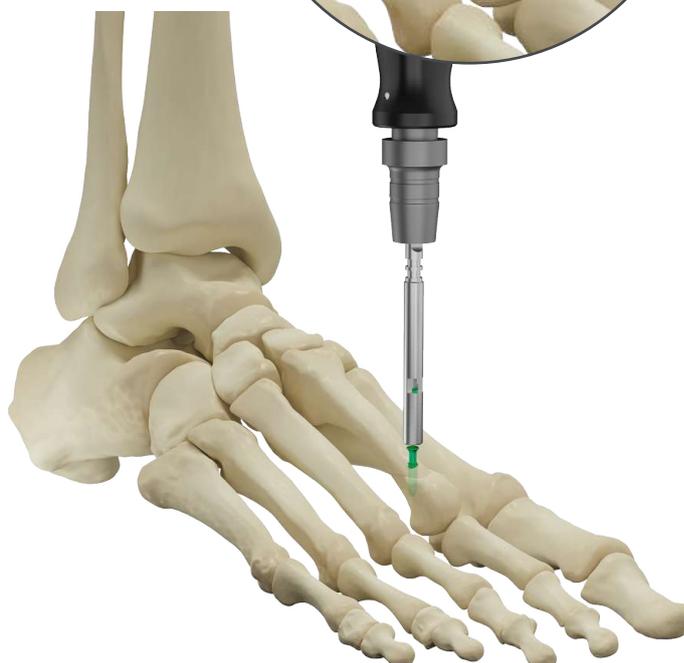



7 | Finalize a inserção do parafuso realizando a compressão final até o desprendimento do dispositivo insersor do parafuso ao nível do estreitamento.



Dando valor ao que realmente importa



[www.razek.com.br](http://www.razek.com.br)



+55 16 2107 2345



+55 16 2107 2346

