



Cânula de Microdebridação Razek

STERILE R PRODUTO
ESTÉRIL

 NÃO REUTILIZAR
PRODUTO DE USO ÚNICO

PROIBIDO
REPROCESSAR

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu “Instruções de Uso”.

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Venda através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A Cânula de Microdebridação Razek possui a função de realizar a microdebridação de tecidos moles, cartilagosos e ósseos em procedimentos cirúrgicos artroscópicos.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por cirurgiões que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

ESPECIFICAÇÕES

- Esterilizado por: Raio Gama
- Validade da esterilização: 3 anos

CONTRAINDICAÇÕES

A Cânula de Microdebridação Razek é contraindicada em procedimentos cirúrgicos não artroscópicos.

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Não utilize a Cânula de Microdebridação Razek em mau estado (tortas ou quebradas), pois isso acarretará trepidação ou vibração excessiva;



Não utilize qualquer componente, que não tenha sido citado neste manual. A utilização de componentes diferentes irá danificar a Cândia de Microdebridaçã Razek;



Se os componentes apresentarem algum dano, os mesmos nã devem ser utilizados;



Nunca utilize um dispositivo que apresente superaquecimento;



A substituiçã da Cândia de Microdebridaçã Razek deve ser realizada somente depois que o equipamento nã estiver mais funcionando e nem superaquecido;



NÃO REUTILIZAR O PRODUTO, POIS O MESMO É DE USO ÚNICO;



PROIBIDO REPROCESSAR.

CÂNULA DE MICRODEBRIDAÇÃ RAZEK

A Cândia de Microdebridaçã Razek é composta por uma cândia de corte e sucçã e uma cândia guia. A cândia de corte e sucçã está localizada dentro da cândia guia.

EQUIPAMENTOS COMPATÍVEIS


A família da Cândia de Microdebridaçã Razek apresenta diferentes tipos de encaixe. A seguir estã indicados os tipos de encaixe. Deste modo, o usuáriu poderã facilmente identificar a cândia necessáriu para cada equipamento.




Cândia de Corte e Sucçã

Cândia Guia


• Encaixe R

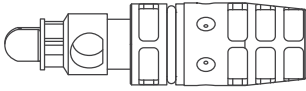


• Encaixe A

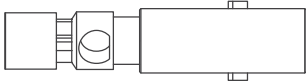


• Encaixe F

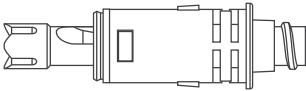


• Encaixe T

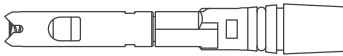


• Encaixe L

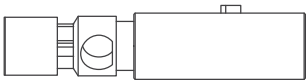


• Encaixe E

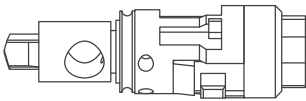


• Encaixe P

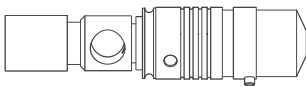


• Encaixe S

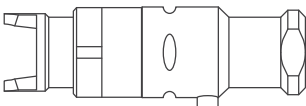


• Encaixe K

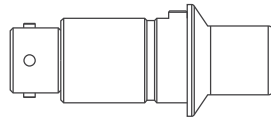


• Encaixe W

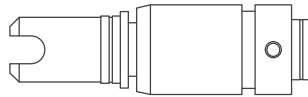


• Encaixe J

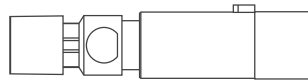


• Encaixe B

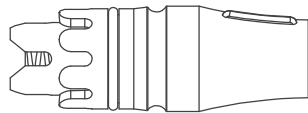

• Encaixe Z

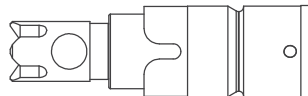

• Encaixe V

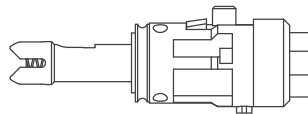

MODELOS

Os modelos da família da Cânula de Microdebridação Razek serão diferenciados pelo tipo de ponta ativa, tipo de encaixe e diâmetros internos e externos:

- Tipos de ponta ativa: FRR - AFR - INC - FRI - MC - AMC - DMC - RB - OB - TB
- Diâmetros internos/externos disponíveis: 2,0 / 3,5 - 2,4 / 4,5 - 2,9 / 5,5 - 2,9 / 6,5
- Encaixes disponíveis: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B - Z - V

A seguir serão apresentados todos os modelos disponíveis com os diferentes tipos de ponteira (corte), suas indicações e as suas possíveis combinações.

• FRR

As cânulas com corte tipo FRR (Resector do Perfil Completo) devem ser utilizadas em tecidos moles para pequenas remoções. Rotação máxima: 3.000 rpm.



Modelos:

- Diâmetros internos/externos: 2,0 / 3,5 - 2,4 / 4,5 - 2,9 / 5,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B - Z - V

• AFR

As cânulas com corte tipo AFR (Agressivo de Perfil Completo) devem ser utilizadas em tecidos moles para médias remoções. Rotação máxima: 3.000 rpm.



Modelos:

- Diâmetros internos/externos: 2,0 / 3,5 - 2,4 / 4,5 - 2,9 / 5,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B - Z - V

• INC

As cânulas com corte tipo INC (Incisivo) devem ser utilizadas em tecidos moles, de modo agressivo, para pequenas remoções. Rotação máxima: 3.000 rpm.



Modelos:

- Diâmetros internos/externos: 2,0 / 3,5 - 2,4 / 4,5 - 2,9 / 5,5

- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B - Z - V

• FRI

As cânulas com corte tipo FRI (Cortador Completo Incisivo) devem ser utilizadas em tecidos moles para grandes remoções. Rotação máxima: 3.000 rpm.



Modelos:

- Diâmetros internos/externos: 2,0 / 3,5 - 2,4 / 4,5 - 2,9 / 5,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B - Z - V

• MC

As cânulas com corte tipo MC (Cortador de Menisco) devem ser utilizadas para remover tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 3.000 rpm.



Modelos:

- Diâmetros internos/externos: 2,0 / 3,5 - 2,4 / 4,5 - 2,9 / 5,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B - Z - V

• AMC

As cânulas com corte tipo AMC (Cortador de Menisco Agressivo) devem ser utilizadas para remover grande quantidade de tecido cartilaginoso. Rotação máxima: 3.000 rpm.



Modelos:

- Diâmetros internos/externos: 2,0 / 3,5 - 2,4 / 4,5 - 2,9 / 5,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B - Z - V

• DMC

As cânulas com corte tipo DMC (Duplo Cortador de Meniscos) devem ser utilizadas para remover tecido cartilaginoso, com duas arestas cortantes. Rotação máxima: 3.000 rpm.



Modelos:

- Diâmetros internos/externos: 2,0 / 3,5 - 2,4 / 4,5 - 2,9 / 5,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B - Z - V

• RB

As cânulas com corte tipo RB (Broca Redonda) devem ser utilizadas para pequenas remoções em tecido ósseo. Rotação máxima: 5.000 rpm.

**• Modelos:**

- Diâmetros internos/externos: 2,4 / 4,5 - 2,9 / 5,5 - 2,9 / 6,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B - Z - V

• OB

As cânulas com corte tipo OB (Broca Oval) devem ser utilizadas para moderadas remoções em tecido ósseo. Rotação máxima: 5.000 rpm.

**Modelos:**

- Diâmetros internos/externos: 2,4 / 4,5 - 2,9 / 5,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B - Z - V

• TB

As cânulas com corte tipo TB (Broca Afilada) devem ser utilizadas para grandes remoções em tecido ósseo. Rotação máxima: 5.000 rpm.

**Modelos:**

- Diâmetros internos/externos: 2,4 / 4,5 - 2,9 / 5,5 - 2,9 / 6,5
- Tipos de encaixes: R - A - F - T - L - E - P - S - K - W - J - B - Z - V

ESTERILIZAÇÃO

O produto é esterilizado com raios gama - Co 60. A esterilização possui validade de três anos a partir da data de fabricação, se a embalagem estiver inviolada.

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS

Inspecione a embalagem do produto para verificar se não houve violação. O produto segue esterilizado do fabricante.

MODO DE UTILIZAÇÃO


1. Insira a cânula selecionada no motor adequado, até que a mesma se encaixe completamente;



1. Ajuste a rotação adequada no equipamento;
2. Realize o procedimento cirúrgico.

PROCEDIMENTO PÓS-OPERATÓRIOS

Retire a cânula do Motor.

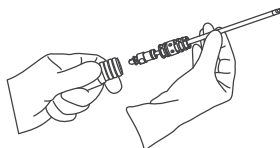

Após o uso da Cânula de Microdebridação Razek, a mesma deverá ser descartada.

TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original, lacrada e sem sinais de violação;
- O produto segue em embalagem estéril. A esterilidade não é válida caso a embalagem protetora esteja violada;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após a utilização ou término da validade do produto, este poderá causar contaminação

ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

VALIDADE

A validade do produto está limitada ao vencimento da esterilização, ou seja, três anos da data de fabricação.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Cuidado



Consultar as
Instruções de Uso



Data de fabricação



Código de Lote



Prazo de validade



Esterilizado
com irradiação



Uso Único



Fabricante



Proteger de
luz solar



Manter seco



Frágil



Este lado para cima



Fabricado por:
RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I
São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30
Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815
n.º ANVISA: 80356130052 - Nome Técnico: Lâmina descartável
Atendimento ao Consumidor: Fone: +55 16 2107 2345

07/BL/02.25



21-MAN-48R Rev.: 07