



[Trocater RZ



NÃO ESTÉRIL

Visando a praticidade e a facilidade no acesso às informações contidas no Manual do Usuário dos nossos produtos, a Razek disponibiliza os documentos para download no endereço eletrônico www.razek.com.br, no Menu “Instruções de Uso”.

Importante: Verifique a revisão do Manual do Usuário indicada no rótulo do produto e o seu n.º ANVISA para identificar corretamente o arquivo desejado.

Para obter o Manual do Usuário impresso, sem custo de envio, favor entrar em contato com o nosso Pós-Venda através do telefone +55 16 2107 2345 ou pelo e-mail posvenda1@razek.com.br.



O fabricante recomenda a leitura de todo o manual antes da utilização do produto.

FUNÇÃO E INDICAÇÃO

A família de Trocater RZ tem por finalidade a condução de instrumentos cirúrgicos invasivos, permitindo a manipulação destes, bem como irrigar e succionar líquidos ou mesmo insuflar gases para o interior de cavidades em procedimentos artroscópicos.



O produto foi desenvolvido para ser utilizado por médicos que estejam familiarizados com a técnica. A utilização inadequada poderá acarretar danos irreversíveis.

SEGURANÇA - PRECAUÇÕES IMPORTANTES



Se os componentes apresentarem algum dano, os mesmos não devem ser utilizados;



A reutilização do Trocater RZ poderá ser realizada se o mesmo estiver em bom estado e apresentar boas condições de limpeza;



A segurança do procedimento está diretamente relacionada ao conhecimento da técnica e treinamento prévio por parte do cirurgião;



Durante os procedimentos cirúrgicos se devem evitar esforços excessivos, pois os mesmos poderão acarretar a quebra do instrumento;



O operador deverá manipular o Trocater RZ com cuidado, pois o mesmo pode perfurar luvas cirúrgicas;



Não use o instrumento com nenhum outro fim que não seja o seu fim designado;




Nunca utilize o Trocater RZ sem antes ter realizado uma limpeza e uma esterilização adequadas;




Não force o instrumento se for encontrada resistência durante a inserção. Forçar o instrumento pode danificar o mesmo. Isto pode causar lesões ao paciente, tais como perfurações, hemorragias ou danos aos tecidos.

TROCATER RZ

O Trocater RZ é composto por:

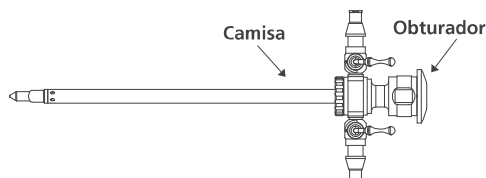


Camisa: A camisa possui 1 ou 2 conectores com torneiras, destinados aos acoplamentos de tubos que poderão, dependendo da necessidade médica, insuflar gases (CO_2 , NO_3 , e etc.) ou irrigar/succionar líquidos (soro fisiológico, etc.)

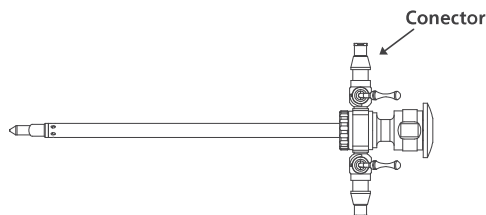

Obturador: O obturador é um instrumento metálico usado em processos de ressecção cirúrgica com a finalidade de permitir a introdução da camisa sem produzir danos aos tecidos das paredes. Pode apresentar os seguintes tipos de pontas: Romba, Perfurante,

Romba Canulada, Pontiaguda, Perfurante.

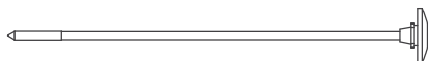

MODELOS

A família de Trocater RZ é composta de modelos com comprimentos e angulações da extremidade da camisa diferentes, que dependem das necessidades do profissional. Cada modelo foi desenvolvido para uma finalidade específica durante a cirurgia.

TROCATER RZ



- Comprimentos disponíveis: 65 | 80 | 110 | 175 mm
- Ângulos disponíveis: 0° | 30° | 70°
- Diâmetros disponíveis: 2,70 | 4,00 mm
- Ponta do Obturador: Ponta Romba, Perfurante e Romba Canulada
- Torneira: Duas
- Camisa Simples
- Modelos disponíveis:

700400900 - Trocater RZ 0° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba

700401000 - Trocater RZ 30° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba

700401100 - Trocater RZ 70° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba

700401200 - Trocater RZ 0° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba Canulada

700401300 - Trocater RZ 30° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba Canulada

700401400 - Trocater RZ 70° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba Canulada

700401500 - Trocater RZ 0° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Perfurante

700401600 - Trocater RZ 30° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Perfurante

700401700 - Trocater RZ 70° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Perfurante

700401800 - Trocater RZ 0° x 65 mm x 2,70 mm - Obturador Ponta Romba

700401900 - Trocater RZ 30° x 65 mm x 2,70 mm - Obturador Ponta Romba

- 700402000 - Trocater RZ 0° x 80 mm x 2,70 mm - Obturador Ponta Romba
- 700402100 - Trocater RZ 30° x 80 mm x 2,70 mm - Obturador Ponta Romba
- 700402200 - Trocater RZ 0° x 110 mm x 2,70 mm - Obturador Ponta Romba
- 700402300 - Trocater RZ 30° x 110 mm x 2,70 mm - Obturador Ponta Romba


TROCATER RZ LONGO



- Comprimentos disponíveis: 275 mm
- Ângulos disponíveis: 0° | 30°
- Diâmetros disponíveis: 2,00 mm
- Ponta do Obturador: Ponta Romba
- Torneira: Duas
- Camisa Simples
- Modelos disponíveis:

- 700450000 - Trocater RZ Longo 0° x 275 mm x 2,00 mm - Obturador Ponta Romba
- 700450100 - Trocater RZ Longo 30° x 275 mm x 2,00 mm - Obturador Ponta Romba

TROCATER RZ ATM

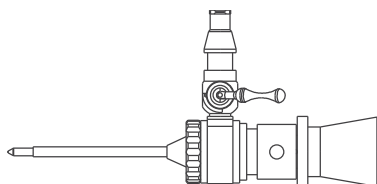


- Comprimentos disponíveis: 65 | 80 | 110 mm
- Ângulos disponíveis: 0° | 30°
- Diâmetros disponíveis: 1,90 | 2,30 mm
- Ponta do Obturador: Ponta Romba e Pontiaguda
- Torneira: Uma
- Camisa Simples

• Modelos disponíveis:

- 700410900 - Trocater RZ ATM 0° x 65 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
- 700411000 - Trocater RZ ATM 30° x 65 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
- 700411100 - Trocater RZ ATM 0° x 80 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
- 700411200 - Trocater RZ ATM 30° x 80 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
- 700411300 - Trocater RZ ATM 0° x 110 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
- 700411400 - Trocater RZ ATM 30° x 110 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
- 700411500 - Trocater RZ ATM 0° x 65 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontiaduda
- 700411600 - Trocater RZ ATM 30° x 65 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontiaduda
- 700411700 - Trocater RZ ATM 0° x 80 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontiaduda
- 700411800 - Trocater RZ ATM 30° x 80 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontiaduda
- 700411900 - Trocater RZ ATM 0° x 110 Mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontiaduda
- 700412000 - Trocater RZ ATM 30° x 110 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontiaduda
- 700412100 - Trocater RZ ATM 0° x 65 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
- 700412200 - Trocater RZ ATM 30° x 65 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
- 700412300 - Trocater RZ ATM 0° x 80 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
- 700412400 - Trocater RZ ATM 30° x 80 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
- 700412500 - Trocater RZ ATM 0° x 110 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
- 700412600 - Trocater RZ ATM 30° x 110 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
- 700412700 - Trocater RZ ATM 0° x 65 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontiaduda
- 700412800 - Trocater RZ ATM 30° x 65 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontiaduda
- 700412900 - Trocater RZ ATM 0° x 80 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontiaduda
- 700413000 - Trocater RZ ATM 30° x 80 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontiaduda
- 700413100 - Trocater RZ ATM 0° x 110 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontiaduda
- 700413200 - Trocater RZ ATM 30° x 110 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontiaduda

TROCATER RZ STK ATM

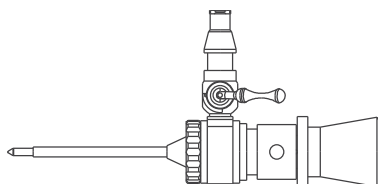

- Comprimentos disponíveis: 65 | 80 | 110 mm
- Ângulos disponíveis: 0° | 30°
- Diâmetros disponíveis: 1,90 | 2,30 mm
- Ponta do Obturador: Ponta Romba e Pontaguda
- Torneira: Uma
- Camisa Simples
- Modelos disponíveis:

700480100 - Trocater RZ STK ATM 0° x 65 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
700480200 - Trocater RZ STK ATM 30° x 65 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
700480300 - Trocater RZ STK ATM 0° x 80 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
700480400 - Trocater RZ STK ATM 30 ° x 80 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
700480500 - Trocater RZ STK ATM 0° x 110 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
700480600 - Trocater RZ STK ATM 30° x 110 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Romba
700480700 - Trocater RZ STK ATM 0° x 65 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontaguda
700480800 - Trocater RZ STK ATM 30° x 65 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontaguda
700480900 - Trocater RZ STK ATM 0° x 80 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontaguda
700481000 - Trocater RZ STK ATM 30 ° x 80 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontaguda
700481100 - Trocater RZ STK ATM 0 ° x 110 Mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontaguda
700481200 - Trocater RZ STK ATM 30° x 110 mm x 1,90 mm - Obturador Ponta Pontaguda
700481300 - Trocater RZ STK ATM 0 ° x 65 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
700481400 - Trocater RZ STK ATM 30° x 65 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
700481500 - Trocater RZ STK ATM 0° x 80 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
700481600 - Trocater RZ STK ATM 30 ° x 80 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
700481700 - Trocater RZ STK ATM 0° x 110 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
700481800 - Trocater RZ STK ATM 30 ° x 110 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Romba
700481900 - Trocater RZ STK ATM 0° x 65 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontaguda
700482000 - Trocater RZ STK ATM 30 ° x 65 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontaguda
700482100 - Trocater RZ STK ATM 0 ° x 80 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontaguda
700482200 - Trocater RZ STK ATM 30 ° x 80 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontaguda
700482300 - Trocater RZ STK ATM 0° x 110 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontaguda
700482400 - Trocater RZ STK ATM 30 ° x 110 mm x 2,30 mm - Obturador Ponta Pontaguda

TROCATER RZ INTERCAMBIÁVEL



- Comprimentos disponíveis: 175 mm
- Ângulos disponíveis: 30° | 70°
- Diâmetros disponíveis: 4,0 mm
- Ponta do Obturador: Ponta Romba, Romba Canulada e Perfurante
- Torneira: Duas
- Camisa Intercambiável
- Modelos disponíveis:

700420900 - Trocater RZ Intercambiável 30° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba

700421000 - Trocater RZ Intercambiável 70° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba


700421100 - Trocater RZ Intercambiável 30° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba Canulada

700421200 - Trocater RZ Intercambiável 70° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba Canulada

700421300 - Trocater RZ Intercambiável 30° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Perfurante

700421400 - Trocater RZ Intercambiável 70° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Perfurante

TROCATER RZ TBP

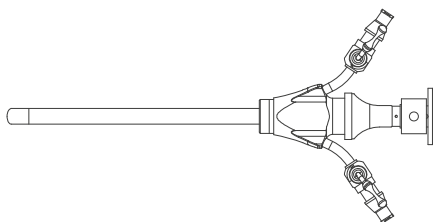

- Comprimentos disponíveis: 175 mm
- Ângulos disponíveis: 0° | 30° | 70°
- Diâmetros disponíveis: 4,00 mm
- Ponta do Obturador: Ponta Padrão

- Torneira: Duas
- Camisa Simples
- Modelos disponíveis:

700490000 - Trocater RZ TBP 0° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Padrão


700490100 - Trocater RZ TBP 30° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Padrão

700490200 - Trocater RZ TBP 70° x 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Padrão

ACESSÓRIOS

Os acessórios podem ser adquiridos separadamente de acordo com a necessidade do profissional.

OBTURADOR RZ

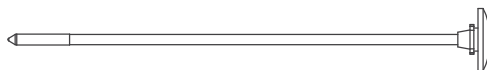

Compatível com os modelos Trocater RZ

700402400 – Obturador RZ 65 mm x 2,70 mm - Ponta Romba

700402500 – Obturador RZ 65 mm x 4,00 mm - Ponta Romba

700402600 – Obturador RZ 80 mm x 2,70 mm - Ponta Romba

700402700 – Obturador RZ 80 mm x 4,00 mm - Ponta Romba

700402800 – Obturador RZ 110 mm x 2,70 mm - Ponta Romba

700402900 – Obturador RZ 110 mm x 4,00 mm - Ponta Romba

700403000 – Obturador RZ 175 mm x 2,70 mm - Ponta Romba

700403100 – Obturador RZ 175 mm x 4,00 mm - Ponta Romba

700403200 – Obturador RZ 65 mm x 2,70 mm - Ponta Perfurante

700403300 – Obturador RZ 65 mm x 4,00 mm - Ponta Perfurante

700403400 – Obturador RZ 80 mm x 2,70 mm - Ponta Perfurante

700403500 – Obturador RZ 80 mm x 4,00 mm - Ponta Perfurante

700403600 – Obturador RZ 110 mm x 2,70 mm - Ponta Perfurante


700403700 – Obturador RZ 110 mm x 4,00 mm - Ponta Perfurante

700403800 – Obturador RZ 175 mm x 2,70 mm - Ponta Perfurante

700403900 – Obturador RZ 175 mm x 4,00 mm - Ponta Perfurante

- 700404000 – Obturador RZ 65 mm x 2,70 mm - Ponta Romba Canulada
- 700404100 – Obturador RZ 65 mm x 4,00 mm - Ponta Romba Canulada
- 700404200 – Obturador RZ 80 mm x 2,70 mm - Ponta Romba Canulada
- 700404300 – Obturador RZ 80 mm x 4,00 mm - Ponta Romba Canulada
- 700404400 – Obturador RZ 110 mm x 2,70 mm - Ponta Romba Canulada
- 700404500 – Obturador RZ 110 mm x 4,00 mm - Ponta Romba Canulada
- 700404600 – Obturador RZ 175 mm x 2,70 mm - Ponta Romba Canulada
- 700404700 – Obturador RZ 175 mm x 4,00 mm - Ponta Romba Canulada


OBTURADOR RZ LONGO

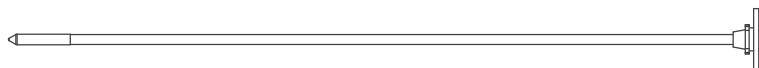

Compatível com os modelos Trocater RZ Longo

- 700450200 – Obturador RZ Longo 275 mm x 2,00 mm - Ponta Romba

OBTURADOR RZ ATM

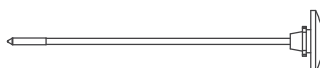

Compatível com os modelos Trocater RZ ATM

- 700413300 – Obturador RZ ATM 65 mm x 1,90 mm - Ponta Romba
- 700413400 – Obturador RZ ATM 65 mm x 2,30 mm - Ponta Romba
- 700413500 – Obturador RZ ATM 80 mm x 1,90 mm - Ponta Romba
- 700413600 – Obturador RZ ATM 80 mm x 2,30 mm - Ponta Romba
- 700413700 – Obturador RZ ATM 110 mm x 1,90 mm - Ponta Romba
- 700413800 – Obturador RZ ATM 110 mm x 2,30 mm - Ponta Romba
- 700413900 – Obturador RZ ATM 65 mm x 1,90 mm - Ponta Pontiaguda
- 700414000 – Obturador RZ ATM 65 mm x 2,30 mm - Ponta Pontiaguda
- 700414100 – Obturador RZ ATM 80 mm x 1,90 mm - Ponta Pontiaguda
- 700414200 – Obturador RZ ATM 80 mm x 2,30 mm - Ponta Pontiaguda
- 700414300 – Obturador RZ ATM 110 mm x 1,90 mm - Ponta Pontiaguda
- 700414400 – Obturador RZ ATM 110 mm x 2,30 mm - Ponta Pontiaguda

OBTURADOR RZ STK ATM



Compatível com os modelos Trocater RZ STK ATM

700482500 - Obturador RZ STK ATM 65 mm x 1,90 mm - Ponta Romba

700482600 - Obturador RZ STK ATM 80 mm x 1,90 mm - Ponta Romba

700482700 - Obturador RZ STK ATM 110 mm x 1,90 mm - Ponta Romba

700482800 - Obturador RZ STK ATM 65 mm x 1,90 mm - Ponta Pontiaguda

700482900 - Obturador RZ STK ATM 80 mm x 1,90 mm - Ponta Pontiaguda

700483000 - Obturador RZ STK ATM 110 mm x 1,90 mm - Ponta Pontiaguda

700483100 - Obturador RZ STK ATM 65 mm x 2,30 mm - Ponta Romba

700483200 - Obturador RZ STK ATM 80 mm x 2,30 mm - Ponta Romba

700483300 - Obturador RZ STK ATM 110 mm x 2,30 mm - Ponta Romba

700483400 - Obturador RZ STK ATM 65 mm x 2,30 mm - Ponta Pontiaguda

700483500 - Obturador RZ STK ATM 80 mm x 2,30 mm - Ponta Pontiaguda

700483600 - Obturador RZ STK ATM 110 mm x 2,30 mm - Ponta Pontiaguda

OBTURADOR RZ INTERCAMBIÁVEL




Compatível com os modelos Trocater RZ Intercambiável

700421500 – Obturador RZ Intercambiável 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba

700421600 – Obturador RZ Intercambiável 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Romba Canulada

700421700 – Obturador RZ Intercambiável 175 mm x 4,00 mm - Obturador Ponta Perfurante

OBTURADOR RZ TBP

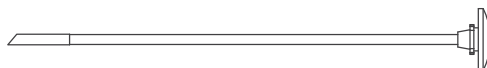


Compatível com os respectivos modelos de Trocater RZ TBP

700490400 – Obturador RZ TBP 0° x 175 mm x 4,00 mm - Ponta Padrão

700490500 – Obturador RZ TBP 30° x 175 mm x 4,00 mm - Ponta Padrão

700490600 – Obturador RZ TBP 70° x 175 mm x 4,00 mm - Ponta Padrão

ADAPTADOR PARA INSTRUMENTAL TBP

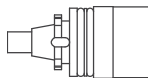

Compatível com os modelos Trocater RZ TBP

700490700 – Adaptador para Instrumental TBP 4,00 mm

PROCEDIMENTOS PRÉ-OPERATÓRIOS



Antes do uso do Trocater RZ certifique-se que este foi esterilizado adequadamente;




Inspecione os instrumentos, verificando se há danos antes do uso. Se for detectado algum dano, não usar o dispositivo antes de consultar as orientações do fabricante.


MODO DE UTILIZAÇÃO

MODELOS: TROCATER RZ, TROCATER RZ LONGO E TROCATER RZ INTERCAMBIÁVEL


1. Após a esterilização, retire o trocater da embalagem estéril utilizando técnica asséptica;
2. Verifique se as torneiras dos conectores estão fechadas;

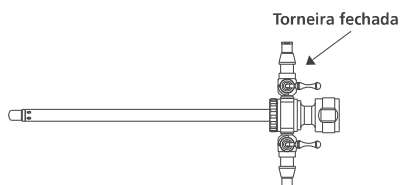


3. Pressione o botão para baixo e insira o obturador na camisa até o final, solte o botão e verifique se o mesmo está conectado na camisa;
4. Insira o trocater na incisão;
5. Para remover o obturador, pressione o botão para baixo e retire o obturador;

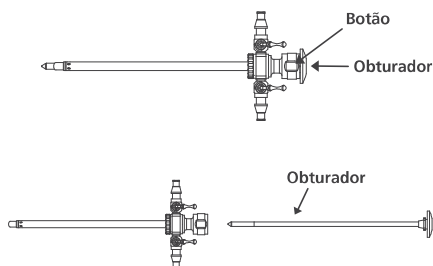

6. Caso seja necessário insuflar gases ou irrigar/succionar líquidos deve-se acoplar os tubos nos conectores da camisa com a torneira fechada;

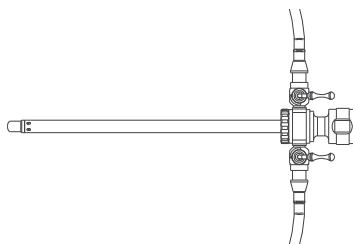


7. Em seguida, abra a torneira, girando a torneira número 1 no sentido anti-horário e a torneira número 2 no sentido horário;

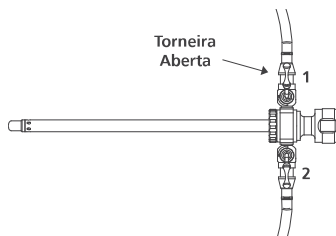


8. Ao final do procedimento, retire ao Trocater RZ da incisão.

MODELO: TROCATER RZ ATM, TROCATER RZ STK ATM E TROCATER RZ TBP


1. Após a esterilização, retire o trocater da embalagem estéril utilizando técnica asséptica;
2. Verifique se as torneiras dos conectores estão fechadas;

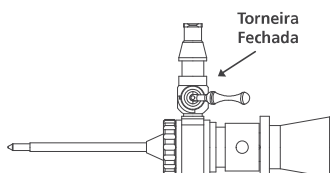


3. Insira o Trocater RZ na incisão;
4. Gire a alavanca no sentido horário e retire o obturador da camisa;

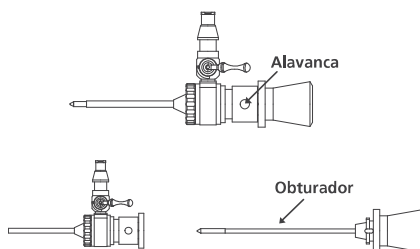

5. Caso seja necessário insuflar gases ou irrigar/succionar líquidos deve-se acoplar os tubos nos conectores da camisa com a torneira fechada;

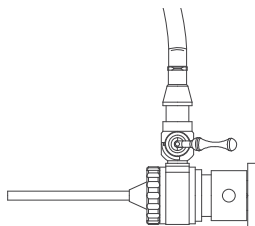

6. Em seguida, abra a torneira, girando no sentido anti-horário;

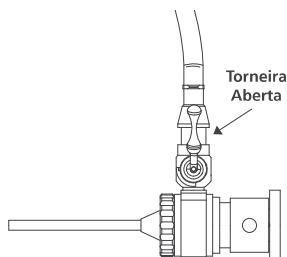

7. Ao final do procedimento, retire ao Trocater RZ da incisão.

LIMPEZA E DESINFECÇÃO


LIMPEZA

- Remova do instrumental a sujeira ressecada, especialmente em áreas tais como juntas ou fendas, antes de lavar;

OBS.: O enxágue e limpeza imediatos após o uso, com detergente enzimático ou alcalino, removerá a sujeira efetivamente e evitará que sangue, muco ou outras secreções fiquem

gradadas.

- Escove toda a superfície do produto com uma escova macia, prestando especial atenção a áreas onde possam se acumular fragmentos;

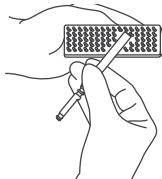

OBS.: Sempre evite o uso de qualquer material áspero que possa arranhar ou danificar a superfície do instrumento.

- Enxágue o produto cuidadosamente com água corrente;



OBS.: Verifique se há sujeira visível no instrumento. Repita a limpeza se houver sujeira visível e reinspecione.

- Com uma toalha de papel ou uma pistola de ar, retire o excesso de água;



8. Envie o instrumental para a esterilização.

DESINFECÇÃO (OPCIONAL)

Abaixo segue uma descrição onde constam alguns parâmetros de lavagem e desinfecção para hospitais que utilizam este dispositivo para tal fim. Esta etapa não é obrigatória. Os itens definidos podem ser modificados com base no protocolo padrão de limpeza-desinfecção do hospital. A temperatura e o tempo de lavagem -desinfecção recomendados são:

• Pré-lavagem:

Temperatura: 35 °C e tempo: 5 minutos

• Lavagem principal:

Temperatura: 93 °C e tempo: 30 minutos

- **Neutralização:**

Tempo: 2 minutos

- **Lavagem final:**

Temperatura: 65 °C e tempo: 10 minutos.

OBS.: A utilização de equipamentos para lavagem -desinfecção poderá causar uma degradação prematura do desempenho do Trocater RZ.

ESTERILIZAÇÃO

O Trocater RZ deve ser esterilizado antes de sua utilização.

A seguir estão ilustrados alguns tipos de esterilizações possíveis, a temperatura e o tempo recomendado para cada procedimento:

Óxido de Etileno: 53-57 °C por 4 horas (Arejamento 18 horas)

Autoclave: 132-134 °C por 15 minutos



Os tipos de esterilização citados acima são apenas orientações recomendadas e poderão variar entre hospitais, dependendo do tipo de equipamento de esterilização e dos agentes patogênicos que possam existir na respectiva área. Os parâmetros de esterilização recomendados podem ser modificados com base no protocolo padrão de esterilização do hospital;



- **O produto não sai esterilizado da empresa;**

- A cada reutilização, uma nova esterilização deve ser realizada;
- Nunca esterilize o instrumento com formalina.

ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE

- O produto deve ser transportado em sua embalagem original;
- Estocar o produto em local fresco e seco, ao abrigo de poeira e umidade, distante de produtos químicos e agentes de limpeza.

DESCARTE

Após o término da vida útil do produto, este poderá causar contaminação ambiental ou poderá ser utilizado indevidamente. Para minimizar estes riscos, o cliente deverá descartar o produto conforme determina a legislação local.

GARANTIA

O produto possui garantia de 3 meses contra defeitos de fabricação. A garantia NÃO cobre o desgaste dos instrumentais, o qual ocorre durante os procedimentos cirúrgicos.

VALIDADE

O produto possui validade indeterminada e a data de fabricação está descrita na embalagem externa.

SÍMBOLOS UTILIZADOS



Data de fabricação



Identifica o
número de série



Prazo de validade
do produto



Fabricado por



Manter seco



Produto não estéril



Fabricado por:
RAZEK EQUIPAMENTOS LTDA

Alameda Sinlioku Tanaka, 170 - Parque Tecnológico Damha I
São Carlos/SP - CEP 13565-261 - CNPJ 07.489.080/0001-30
Resp. Técnico: Renaldo Massini Jr. - CREA SP 0601706815
n.º ANVISA: 80356130104 - Nome Técnico: Trocater
Atendimento ao Consumidor: Fone: +55 16 2107 2345

04/BL/06.25



21-MAN-117R Rev.: 05